

数字化音乐电胃肠动力治疗仪-促进胃肠蠕动设备

产品名称	数字化音乐电胃肠动力治疗仪-促进胃肠蠕动设备
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

数字音乐胃肠治疗仪

号：CGP-II

数字音乐胃肠治疗仪是国内采用音乐电作为起搏信号的胃肠功能治疗仪，利用类正弦信号与音乐信号的优化叠加，模拟出接近于正常人体的胃电生理信号。用该复合信号进行胃肠起搏可快速建立“跟随—谐振”效应，使胃肠电节律得到改善。普通中低频信号由于频率单一穿透能力弱，很难影响到起搏点达到胃肠起搏的功效。

“胃肠起搏”类似心脏起搏是学术界公认的治疗胃肠功能性疾病的有效方法。该方法不同于“神经肌肉刺激”、“透药”、“红外热疗”、“磁疗”、“推拿按摩”等物理疗法。这些疗法可能会对某些症状有所改善但并不能从根本上改变胃肠电节律，达到彻底治疗的目的。

针对音乐电起搏信号的特点，研发并注册了胃肠起搏电极。该电极中导电粘胶的成分为高分子纳米材料与中低频治疗仪、透药治疗仪等所使用的电极片成分有本质区别。使用其他电极会对起搏信号产生衰减和干扰，可能会有不良反应。

数字音乐胃肠治疗仪如何进行治疗？

1.胃肠起搏（图中黄线表示）

将起搏电极贴于胃起搏点在体表的投影位置（正极至于剑突与肚脐连线中点，向右旁开2-4cm处；负极至于中点向左旁开3-5cm再往上1cm处）。

2.穴位刺激（图中绿线表示）

将穴位刺激电极贴与双脚足三里穴位处（该穴位为胃肠功能的主控穴位），也可贴于合谷穴。

3.音乐疗法（图中黑线表示）

治疗过程中头戴耳机聆听音乐。刺激的强弱随着音乐的高低起伏同步变化，犹如音乐喷泉。

4.每次治疗20-40分钟，两次，7天为一个疗程。

操作简单，无需护士陪同！