

万邦供应微电脑超声波美容仪B-628I

产品名称	万邦供应微电脑超声波美容仪B-628I
公司名称	广州市昊邦美容美发设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:万邦 材质:塑料 规格:28.5*23*14
公司地址	广州市白云区太和镇北太路草塘路6号E栋首层一半
联系电话	86-02013560237304

产品详情

品牌	万邦	材质	塑料
规格	28.5*23*14	货号	B-628I
适用送礼场合	商务馈赠	加印LOGO	可以
是否提供加工定制	是		

bm-628微电脑超声波美容仪

一超声波美容仪的作用机理概述

超声波美容仪技术自80年代引入美容界以来，以治疗范围广、见效快、治愈率高、操作简便而受到普遍关注，普及和推广，使其成为众多美容器材中最实用，最受欢迎的设备。其作用主要有三个方面：

1. 机械作用

超声波的机械作用是具有软化组织、增强渗透、提高新陈代谢、促进血液循环、刺激神经系统及细胞的功能。

2. 温热作用

超声波的温热作用能引起血管功能及新陈代谢过程的变化，可使血液循环旺盛使神经兴奋点降低，产生镇痛的作用，使痉挛的肌肤松弛，且有解痉的作用。

3. 化学作用

超声波具有加强催化、加速新陈代谢的作用。可使pH值向碱性方面变化，利于药物透入菌体，提高药物杀菌能力。

二、超声波的治疗和美容功能

1. 超声药物透入治疗功能具备下列特点：

- (1) 所有药物不限于电离物质、水溶物质，药源广阔；
- (2) 超声药物透入比单纯擦药的吸收多且深；
- (3) 药物浓度不受离解度等限制；
- (4) 不存在影响作用强度和时间的极化问题；
- (5) 没有电刺激现象，不会发生电灼伤；
- (6) 操作简便，使用药物最好有一定粘度。

2. 超声波的美容功能

- (1) 软化血栓，消除“红脸”；

应用超声波脉冲治疗，配合适当的活血化瘀药膏。可将变形微细血管矫正，恢复正常，从而可以消除红脸。

- (2) 消除暗疮愈后疤痕

由于超声波能渗透皮肤，不但能溶解渗出皮肤干涸了的血液，同时能加强血液循环及新陈代谢，使色印更快退去，超声波配合暗疮膏治疗，一般隔日一次，10次为一疗程。

- (3) 消除皮肤色素异常

用超声波配合中药面霜或雀斑霜之类和高单位维他命c，见效快，能彻底清除，应用超声波的治疗三次见效，10-40次可将之去除。

- (4) 分化色素除皮下斑

做法经疗程计算，10次为1疗程，中间须休息七天，独特之处是超声波的冲击能破坏色斑细胞之内膜，阻止它成型，化解色素，使其随着新陈代谢作用而使斑症完全消失。

- (5) 皱除皱、去瘀散血、拉皮

运用超声波的机械按摩作用，一方面调节了皮下细胞通过细胞膜的变化，另一方面又加强了血液循环和代谢功能。因此使小皱纹日渐消失，就连硬物碰伤的瘀血硬块也会彻底消除。

- (6) 消除眼袋和黑眼圈

由于超声波美容机的机械按摩作用能加速血液和淋巴循环，加上热能作用，更能溶解脂肪，加速皮下吸收，过多积聚的水份和脂肪消散，眼袋黑眼圈便随之消失。用超声波美容仪的小头顺着皮肤纹理的走向按摩，每次每个眼袋5分钟，力度要轻柔，声头不要对准眼球方向。

- (7) 软坚去脂治暗疮

应用超声波美容仪加暗疮消火膏，轻轻在疮体按摩一分钟左右，暗疮痊愈的同时，可避免因此而形成的硬疤。

(8) 皮硬化症及蛇皮病态

应用超声波美容仪配合甘油，液体石蜡或高级润肤剂作按摩式治疗，能快速改善症状。

(9) 常作按摩改善皮质利用超声波美容仪进行适当处理，便能尽快消除斑、疮，并使皮肤质素得到改善或恢复。

三、超声波美容治疗的剂量及波形选择

1. 超声波美容治疗的剂量包括超声波的强度、治疗时间、治疗次数、重复使用规律、疗程等多种因素。
2. 剂量的强度以0.5w/平方厘米-1.25w/平方厘米为宜。
3. 剂量的时间一般全脸为5-15分钟，增大剂量或延长治疗时间不能增加效果。
4. 疗程应根据病情而定，痤疮一般3-5次，慢性病如：黄褐斑、瘢痕、眼袋、黑眼圈等等，10次为一个疗程，隔日一次。保护性可一星期做一至二次。个别病在治疗2-3次后病情有加剧表现，在这情况下，可减低强度并将治疗间隔时间适当延长，疗程间歇1-2周为宜，如须治疗3-4个疗程者，自第二个疗程后，毛细血管扩张的，应选用脉冲波。其余均可选用连续波。

四、超声波美容方法步骤

操作步骤：

1. 应用超声波仪前，用适当洗面乳液清洁面部皮肤；
2. 抹去洗面乳后，用喷雾仪蒸面10分钟；
3. 将面部黑头、粉刺等清除干净；
4. 用适当的收缩水轻拍于面部各部位；
5. 轻轻抹去收缩水；
6. 分析清楚皮肤的性质，要处理的问题，然后选择最适当的药膏。
7. 将选好的药膏均匀适当地擦在脸上；
8. 接通电源，选择适当输出插座接上超声探头；
9. 按电源开关（power），调好功率大小（energy）。
10. 调节适当时间（timer），一般为15分钟；
11. 根据需要选择波形（state）--“连续波（）或“脉冲波”（）；
12. 用探头在已搽药膏的皮肤上按摩；

13. 超声波做完后，要清洗探头；

14. 如能选择适当中药模粉倒模，则皮肤清爽宜人。

五、注意事项：

1. 做超声波前先要清洁面部（或患部）；

2. 使用的药物最好有一定粘度这样便于将超声波工作头与皮肤较好的结合起来，有利于皮肤吸收，并避免烧坏超声波工作头，应涂上足够的药物量在皮肤上。

3. 使用超声波时间一般为15分钟，加长时间不会增加效果。

4. 处理部分小范围的，请使用小探头，并减少使用时间，8-10分钟为宜。

5. 超声波请勿靠近眼部及接触眼睛。

6. 切记不允许超声波工作（15分钟以上）输出超声能量时而不进行美容操作，以免因超声波工作过热而损坏。

六、综合美容仪技术指标

1. 检查本仪器后电源电压频率1.00mhz-1.1mhz (有载时)

2. 工作定时范围:1-30分钟(一分钟步进,可调)

3. 功率输出显示级数10级,其中绿色三级,黄色三级,红色四级;

4. 输出功率:0-10w可调;

5. 脉冲输出调制频率4hz;

6. 输出电源电压110v/220v(机身后面电源转换开关调节)50-60hz

7. 供电功率<40w;