

供应美容仪器四合一美容仪M-3396

产品名称	供应美容仪器四合一美容仪M-3396
公司名称	河南星维庆医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:1 型号:M-3396 规格:45*34*27
公司地址	郑州市中原区伊河路136号光合大厦19楼1913
联系电话	17266030525

产品详情

品牌	万邦	型号	M-3396
规格	45*34*27	产地	中国

高周波电疗，超声波，吸油垢，喷化妆水

m—3396多功能美容仪

一、吸喷：

二、

(一)、功能：

- 1、吸喷的功能将毛细孔中多余的脂肪、污垢等彻底消除。
- 2、喷化妆水的功能可将化妆水呈雾状喷出，具有营养及镇静皮肤作用。

(二)、注意事项：

- 1、吸嘴玻璃分三种形状，依处理部位的不同而替换不同的玻璃管。
- 2、使用的玻璃管应用中性清洁剂洗净，再消毒、并保持干燥。

二、高周电疗

功能：

- 1、利用特殊的紫外线做局部或点状的照射，具杀菌效能，加速问题皮肤伤口的愈合。
- 2、消除面斑，青春痘并治疗斑。

操作方法：

- 1、将导线插入导线座。
- 2、将紫外线玻璃管插入电疗棒中。
- 3、打开电疗旋钮，转动旋钮，选择适当的强度、即可进行工作。
- 4、使用完后，先将电疗旋钮归零，并关闭电源后再抽出紫外线玻璃管。

注意事项：

- 1、紫外线玻璃管应随时保持干燥清洁。
- 2、做电疗时，同一部位不可停留过久，以免造成疤痕。
- 3、治疗前应御除身上之金属手饰。

三、超声波

超声波美容仪的作用机理概述

超声波美容仪技术自八十年代引入到美容界以来，以其治疗范围广、见效快、治愈率高、操作简梗而受到普遍关注，普及和推广，使其成为众多美容器材中最实用，最受欢迎的设备。其作用主要有三个方面：

1、机械作用

超声波的机械作用具有软化组织，增强渗透，提高新陈代谢，促进血液循环，刺激神经系统及细胞等功能。

2、温热作用

超声波的温热作用能引起血管功能及新陈代谢过程的变化，可使血液循环旺盛，使神经兴奋点降低，产生镇痛的作用，使痉挛的肌肉纤维松弛，而且有解痉的作用。

3、化学作用

超声波具有加强催化、加速新陈代谢的作用。可使pH值向碱性方面变化，利于药物透入菌体，提高药物杀菌能力。

超声波的治疗和美容功能

1、超声药物透入治疗功能具备下列特点：

- (1)、所有药物不限于电离物质、水溶物质，药源广阔；

- (2)、超声药物透入比单纯擦药的吸收多且深；
- (3)、药物浓度不受离解度等限制；
- (4)、不存在影响作用强度和时间的极化问题；
- (5)、没有电刺激现象，不会发生电灼伤；
- (6)、操作简便，使用药物zuihao有一定粘度。

2、超声波的美容功能

- (1)、软化血栓，消除“红脸”；

应用超声波脉冲治疗，配合适当的活血化瘀药膏，可将变形微细血管矫正，恢复正常，从而可以消除红脸。

- (2)、消除暗疮愈后疤痕

由于超声波能渗透皮肤，不但能溶解渗出皮肤干涸了的血液，同时能加强血液循环及新陈代谢，使色印更快退去。超声波配合暗疮膏治疗，一般隔日一次，10次为一个疗程。

- (3)、消除皮肤色素异

用超声波配合中药归 密面霜或祛斑霜之类和高单位维他命c，见效快，能彻底清除，应用超声波治疗三次见效，10—40次可将之去除。

- (4)、分化色素除皮下斑

做法以疗程计算，10次为一疗程，中间须休息七天，独特之处是超声波的冲击能破坏斑色素细胞之内膜，阻止它的形成，化解色素，使其随着新陈代谢作用而使斑完全消失。

- (5)、防皱除皱、去淤散血、拉皮

运用超声波的机械按摩作用，一方面调节了皮下细胞通过细胞膜的变化，另一方面又加强了血液循环和代谢功能。因此使小皱纹日渐消失，就连硬物碰伤的淤血硬块也会彻底消除。

- (6)、消除眼袋和黑眼圈

由于超声波美容仪的机械按摩作用，过多积聚的水分和脂肪消散，眼袋便随之消失，蓝色不再明显，黑眼圈也就没有了。用超声波美容仪的小头顺着皮肤纹理的走向按摩，每次每个眼袋5分钟，力度要轻柔，声头不要对准眼球方向。

- (7)、软坚去脂治暗疮

应用超声波美容加暗疮消火膏，轻轻在疮体按摩一分钟左右，暗疮痊愈的同时，可避免因此而形成的硬疤。

(8)、皮硬化症及蛇皮病态应用超声波美容仪配合甘油，液体石蜡或gaoji润肤剂作按摩式治疗，能快速改善症状。

(9)、常作按摩改善肤质

利用超声波美容仪进行适当处理，便能尽快消除，并使皮肤质素得到改善或恢复。

超声波美容治疗的剂量及波形选择

- 1、超声波美容治疗的剂量包括超声波的强度、治疗时间、次数、疗程等。
- 2、剂量的强度以0.5w/cm—1.25w/cm
- 3、剂量的时间一般全脸为5—15分钟，增在剂量或延长不能增加效果。
- 4、疗程应要据病情而定，隔日一次。保护性可一星期做一至二次。个别病在治疗2—3次后病情有加剧表现，在这情况下，可减低强度并将治疗间隔时间适当延长，疗程间歇1—2周为宜，如须治疗3—4个疗程者，自第二个疗程后，其间歇时间应更长些。
- 5、在波形的选择上，一般来说，有炎症、红肿化脓的，毛肿化脓的，毛细血管扩张的，应选用脉冲波。

操作步骤：

- 1、使用超声波美容仪前、先用适当洗面乳液清洁面部皮肤；
- 2、洗去洗面乳液后，有喷雾仪蒸面十分钟；
- 3、将面部黑头、粉刺等清除干净；
- 4、用适当的收缩水轻拍于面部各个部位，轻轻擦去吸缩水；
- 5、分析皮肤性质，确认要处理的问题，然后选择最适当的药膏；
- 6、将选好的药膏均匀地擦在脸上；
- 7、接通电源、打开超声波旋钮，调节输出功率（可以通过观察超声波强弱显示灯决定所需要的功率）。
- 8、把探头插上，大探头插左边，小探头插右边，设定所需要工作时间，一般为15分钟，最长时间为30分钟。
- 9、根据需要选择波形，“连续波”（ ）或脉冲波(ii)；
- 10、用探头在已擦药膏的皮肤上按摩；
- 11、超声波做完好人后，关掉电源，并清洗探头；

注意事项：

- 1、做超声波前先要清洁面部（或患部）。
- 2、使用的药物zuihao有一定粘度，这样便于将超声波工作头皮肤较好地融合起来，有利于皮肤吸收，并为避免烧坏超声波工作头，应涂上足够的药物量，在皮肤上。

- 3、使用超声波时间一般为15分钟，加长时间不会增加效果；
- 4、处理部分小者，请使用小探头，并减少使用时间为8—10分钟为宜。
- 5、超声波头切勿靠近眼部及接触眼睛；
- 6、切记不允许，超声波工作头时间（15分钟以上）输出超声能量时而不进行美容操作，以免因超声波工作头过热而烧坏。