

# 脉冲冲洗机-清创治疗仪-产品供应

产品名称	脉冲冲洗机-清创治疗仪-产品供应
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

### 多功能清创机MUI-T8S

产品名称：多功能清创设备

因清创问题在医院发生纠纷已是常事，如何清创才能尽可能避免创面二次伤害？如何尽可能的避免此类纠纷？医用多功能清创机，致力于创面彻底清理，针对急性慢性创面，具有超声波无痛清创，有利于缓慢性难愈合创面的清理，杀菌率达到98%，促进伤口愈合周期40%，为患者提供更高品质的保障，使患者满意，医院舒心。

产品号：MUI-T8S

### 产品概述

多功能清创机MUI-T8S是一种集超声波清创和快速脉动压力清创及废液回收、图文工作站多位一体的可以处理各种外伤、手术伤及糜烂性组织伤口，是目前国内更为先进一种清创医疗设备。

### 产品原理

本设备选用56kpa安全水压和 $40 \pm 5$ KHZ的超声波产生的空化效应、机械效应和温热效应，同时设备还有清洗液预热的功能。

### 治疗机理

多功能清创机具有快速脉动压力清创和超声波清创及废液回收多位一体之功能。快速压力清创将产生出脉冲压力水，使创伤组织表面在收缩和舒张之间有规律的反复交替出现，冲洗液中的水流气泡破裂产生的推力，将使夹杂在创面的污染物松动地被水流带走。通过冲洗液的多种物理联合作用可达到清除创面的异物，这种清创主要用于大面积开放性创伤。使用中冲洗枪的脉动压力水流在医务人员的操作下可以从任意角度针对性地冲洗创面，大大提高清创的速度和洁净度。

超声波清创是将清洗液产生空化效应，使得微水滴形成气泡 增大 破裂，产生出爆破力，当巨量连贯的微水滴形成连续气泡群，在气泡增大直至破裂过程中生成局域高密度的能量波，作用在溃疡组织表面并击碎之，但对于完好的组织没有任何损伤，这种清创主要用于溃疡组织。

这种冲洗方法明显优于传统的创面处理方式，大大减少借助纱布擦拭的次数、减轻患者的痛苦，大面积冲洗速度快捷、方便、清创时间缩短，深度伤口也可得到清除，避免发生二次污染，固体杂物和液体污染一同被清除，冲洗后的污水容易回收、便于集中处理。

### 创新技术优势

快捷、安全、方便的操作系统：打开电源开关直接进入工作状态，无需等待，直接工作。

独有的双核设计：多功能清创机、超声清创和脉动压力清创可同时使用，互不影响。&np;大的解决了不同类创面清创的等待时间。