

# 进口医用多酶清洗液

产品名称	进口医用多酶清洗液
公司名称	陕西引领未来生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凯卫伦特 型号:5L 产地:澳大利亚
公司地址	陕西省西安市碑林区雁塔北路万达广场2号楼1单元10812室
联系电话	18191572927

## 产品详情

进口医用多酶清洗液凯卫伦特（第四代）采用新生物酶技术，高效清除各种医疗污垢，适用于玻璃、陶瓷、不锈钢及塑料等材质的医疗器械，对所有可重复使用的医疗器械无损伤，清洗后光洁如新。本产品不含醛、苯和硼等成分，手工清洗、超声波清洗、机器清洗等方式均可使用。原产地：澳大利亚。

### 【多酶清洗剂品牌产品特点】

1. 采用新生物酶技术，将第四代配方多种生物酶有效融合，高效去除各种医疗器械上复杂部位的污垢、蛋白质、生物膜。
2. 适用范围广，快速分解器械上的血液、组织、粘液、分泌物等各种污物。
3. pH 值呈中性、低泡、易漂洗，对医疗器械无腐蚀。
4. 气味温和、无刺激、无残留、生物降解、安全环保，无污染。
5. 适用清洗方式：手工清洗、超声波清洗、机器清洗均可。
6. 稀释比例范围：1:100-600。
7. 不含醛、苯和硼等成分，符合美国和欧盟标准。

### 【使用方法】

1. 稀释比例（建议）：

手工清洗1:100-300（如：1:300，即：1份本产品加入到300份水中）

机器及超声清洗1:100-600（如：1:600，即：1份本产品加入到600份水中）

## 2. 水温要求：

手工清洗

推荐使用温度 25 -45

机器及超声清洗

## 3. 使用建议：

内镜器械清洗建议以手工清洗方式为主，机器清洗为辅。

一般手术器械建议可采用手工、超声波与机器结合的清洗方式。

口腔器械清洗以手工结合超声波清洗即可，有条件可采用机器清洗。

### 【注意事项】

1. 将器械拆卸到小单位，软式内镜及硬件内镜等管腔器械浸泡前线抽吸和冲洗管腔。

2. 将污染器械完全浸泡在酶清洗液中

2-5分钟，如污染严重可适当延长浸泡时间，用手工刷洗或清洗机清洗干净。

3. 操作场所应保持空气流通。操作时应穿戴合适的保护衣、口罩及手套，避免与眼睛和皮肤接触。若使用过程中，眼睛与皮肤不慎与本产品接触时，应立即用流动的自来水冲洗至少10分钟，同时寻医求助。

4. 凯卫伦特多酶清洗液应在使用前稀释，稀释液应在24小时内用完。

5. 凯卫伦特多酶清洗液5升装的浓缩液，产品启封后应在8周内用完。