

美迪泰理疗用体表电极招商 脑循环耗材

产品名称	美迪泰理疗用体表电极招商 脑循环耗材
公司名称	河南美迪泰医疗科技有限公司
价格	88.00/袋
规格参数	型号:KFN-TB01 品牌:美迪泰/克夫尼 尺寸:10*15
公司地址	河南省郑州市管城回族区紫荆山路62号1号22层222号
联系电话	18937127264

产品详情

理疗用体表电极主要用于为脉冲治疗仪和其他带输出电极的理疗设备的专用产品，实际应用中，理疗用体表电极除配合中低频设备之外，还可以配合经颅磁治疗仪、脑循环功能障碍治疗仪等脑病治疗设备适用，起到渗透和增强治疗效果的作用。

理疗用体表电极根据材质和使那个用场景不同，一般分为三大类，理疗类、透药类、脑循环类，使用场景不同，制作工艺也不同，美迪泰医疗可以根据客户需求，定制这三大类的电极片

使用方法如下；1、使用本品使用前，先清洁要粘贴的部位。

2、撕开包装袋，将本品与中(低)频脉冲治疗仪的导线连接好，揭开护胶片，

将粘胶片直接粘贴于所需部位。粘贴电极时应轻轻按压，要确保电极中心的压敏感导电胶紧贴切皮肤，导电效果更佳。

3、打开机器开关，按治疗仪的说明书操作机器。使用完后先关掉开关，再取下粘胶片存放好，以备下次使用。

产品特性；用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。本品为一次性用品，严禁重复使用。

适用注意事项；1、电极使用时应与皮肤紧密、均匀接触；

2、治疗中电极应避免接触伤口及瘀痕；

- 3、治疗中电极不可置于心脏前后;
- 4、电极使用过程中，如感觉温度过高，应立即停止使用，避免烫伤;
- 5、使用时偶有过敏现象发生，如使用部位出现瘙痒、皮疹、水泡，应更换部位，严重者停止使用;
- 6、本产品不可重复使用;
- 7、使用前或使用中如有问题，可向医生咨询。