

# 大号电子体温计 数字式体温计 带提示功能

产品名称	大号电子体温计 数字式体温计 带提示功能
公司名称	义乌市昊鑫日用品有限公司
价格	4.00/件
规格参数	品牌:昊鑫 型号:ckhg 类型:电接点玻璃温度计
公司地址	中国 浙江 义乌市 浙江省义乌市江东街道下王新村D区36幢
联系电话	86 0579 85880659 18967495965

## 产品详情

品牌	昊鑫	型号	ckhg
类型	电接点玻璃温度计	测量范围	32 ° C ~ 42 ° C ( )
结构型式	直型	示值误差	0.1
外形尺寸	外形尺寸：130（长）*17（宽）*10（厚（mm）		

### 【产品简介】

一个既安全又实用的温度计，不再担心孩子使用传统温度计时因玻璃破碎而引起水银中毒等不良后果。而且能在很短的时间内准确测试出体温，为家居必备之用品。专为婴儿设计，探热时间约为1分钟，测量精度达0.1度，带声音提示，记忆功能。可用于口腔量法、腋下量法及直肠量法。

### 【技术指标】

测量范围：32 ° c ~ 42 ° c

测量温度低于 32 ° c 时显示 l ° c

测量温度高于 42 ° c 时显示 h ° c

测量精度：± 0.1 ° c

电源电压：dc1.5v

电池寿命：约3年（以1天使用10分钟计算）

外形尺寸：130（长）\*17（宽）\*10（厚）mm

重量：约11克

### 【使用方法】

- 1.使用前，应先用酒精对体温计传感头进行消毒
- 2.按压电源键，蜂鸣器会发出蜂鸣声，显示提示符号
- 3.随后，显示器显示上次测量的温度，并持续2秒钟，接着显示器 $^{\circ}\text{C}$ 符号闪烁，表示已处于待测状态
- 4.将体温计传感头放入测量部位，显示器显示温度逐渐上升。同时 $^{\circ}\text{C}$ 符号闪烁，表示测量进行中。

测量中如连续16秒温度不变，则 $^{\circ}\text{C}$ 符号停止闪烁，同时发出蜂鸣提示声，表示体温测量完毕并已记忆测量结果，即可读取显示出的温度值

外形尺寸：130（长）\*17（宽）\*10（厚）mm