

禧幻医用伤口敷料

产品名称	禧幻医用伤口敷料
公司名称	稳得希林（杭州）生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市钱塘新区下沙街道福城路291号和达药谷中心1709室
联系电话	13701958788 19534032660

产品详情

不包扎伤口：3-4次/日

- 1、包扎伤口：与换药频次一致;浓度越高、剂量越大，效果越好(如需包扎创口，在清创后的伤患处覆以适当大小的纱布，将敷料均匀涂加于纱布，适当包扎即可)
- 2、新鲜创面：包括：慢性肉芽创面(糖尿病足、放射伤口等)、溃疡和褥疮。
- 3、伤口若用酒精、碘伏、双氧水、重金属等消毒剂消毒后，必须用生理盐水或干棉签将残留的消毒剂冲洗干净、拭干，再使用禧幻伤口敷料。
- 4、创面有感染风险者，建议联合外用抗感染制剂。联合用药一定要首先使用禧幻伤口敷料。如与抗生素及含银敷料联合使用时，好间隔10分钟再用以上产品，使用过程中尽量保持无污染。