

# 桡骨下端夹板A医用桡骨下端夹板批发A木质桡骨下端骨折固定夹板生产厂家

产品名称	桡骨下端夹板A医用桡骨下端夹板批发A木质桡骨下端骨折固定夹板生产厂家
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:大中小 型号:桡骨下端夹板 材质:木质
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号(注册地址)
联系电话	0318-7528214 15533837232

## 产品详情

桡骨下端夹板A医用桡骨下端夹板批发A木质桡骨下端骨折固定夹板生产厂家

桡骨下肢骨折夹板固定方法有以下步骤：

一、先要把骨折复位。

第二、在骨折部位敷上活血化瘀、消肿止痛的中药药膏。

第三、在桡骨远端的背侧和掌侧分别放置平垫，然后用纱布固定。

第四、先放上掌侧夹板，再放上背侧夹板，然后放桡侧夹板，后放尺侧夹板。

第五、用四条扎带分别捆扎夹板，捆扎的顺序是先扎中间两道，再扎远端那一道，后扎近端一道，松紧度以上下活动一厘米为度。

第六、用颈腕带悬吊患肢于胸前。

对伸直型桡骨远端骨折的治疗主要采用牵抖复位法或提按复位法将骨折进行复位，对屈曲型桡骨远端骨折一般采用三人复位法将骨折复位，恢复腕关节的掌倾角和尺倾角