

金稻旋钮式超声波 金稻

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 金稻旋钮式超声波 金稻 |
| 公司名称 | 因美特美容美发仪器公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:金稻 |
| 公司地址 | 中国 广东 佛山市 广州市，白云区，机场路怡发广场2楼C02A |
| 联系电话 | 86 020 86395166 18924872788 |

产品详情

品牌 金稻

工作原理：

保持健康、美丽的皮肤 超声波传送到身体的过程中，被表皮、真皮、皮下组织所吸收，吸收的超声波转换成热量，超声波的热效应使生物体组织的温度轻微上升（0.5~1℃），推动毛细血管的功能及细胞间淋巴液的流动，有助于将细胞所需的营养运输到毛细血管，促进新陈代谢。接近皮肤表层的没有毛细血管的部位，淋巴液代替血液流动，可以帮助淋巴液的流动使变得粗糙的皮肤焕然一新，促进新陈代谢。并协助淋巴液的流动，保持健康的皮肤。保持皮肤弹性/分解脂肪及防止肥胖 每秒震动100万次的超声波传送到组织时，组织会随着超声波的震动产生每秒100万次的轻微震动。轻微震动刺激生物体组织和皮肤组织，缓解紧张，保持皮肤的弹性，震动产生的热量使脂肪分解更容易，有助于预防肥胖。使皮肤吸收营养 提供皮肤营养的化妆品，必须渗透到皮肤内才能发挥其效果。但是由于大部分皮肤的最外层表皮（epidermis）角质层和颗粒层（granular layer）的阻碍，不能渗透到表皮深处。出色的清洁作用 超声波传达到皮肤表面时，在局部产生瞬间的强压和震动，这种效果有助于去除皮肤表面与毛孔里的排泄物。疙瘩或痤疮是皮脂堵住毛孔而产生的炎症。超声波震动传达到这种皮肤，震动效果使毛孔里的皮脂易于排出，帮您预防疙瘩或痤疮。有光泽透明的皮肤 黑色素是雀斑、色斑、黑皮肤的罪魁祸首。超声波促进黑色素的氧化，可淡化雀斑，但色斑和黑皮肤与表面的雀斑不同，是由于包裹基部黑色素的浅色细胞变黑透到表面形成的。超声波的震动与热作用，促进表皮深层浅色细胞内黑色素的排出，使皮肤变得白皙、美丽。

使用方法：

清洁面部皮肤，然后做喷雾机蒸面十分钟。 * 用适合收敛水轻拍于面部各个部位至吸收，使皮肤得以彻

底的消毒和最佳保护。*将精华素均匀地抹在脸上，以声头操作时灵活转动为准。*接通电源，选择适当输出插座，接上超声探头。*按电源开关,调好功率大小*调节适当时间，一般为15分钟。*调节波形，根据需要选择波形连续波或脉冲波。

使用说明：1、做超声波之前要清洁面部皮肤。2、先涂上足够乳霜，声头方可开启，以防烧坏声头。3、当旋钮调至零或能量输出灯全部熄灭时探头均无能量输出4、声头不能长时间(30分钟以上)输出超声能量而不进行美容操作，以免声头过热损坏。5、超声波做完后要清洁探头。