

腰椎牵引带-腰椎骨折腰椎增生腰间盘突出-黑龙江腰椎牵引带厂家

产品名称	腰椎牵引带-腰椎骨折腰椎增生腰间盘突出-黑龙江腰椎牵引带厂家
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

产品详情

腰椎牵引带-腰椎骨折腰椎增生腰间盘突出-黑龙江腰椎牵引带厂家

腰椎牵引带简介：

主要用于腰椎骨折牵引，腰椎骨质增生牵引，腰椎盘突出症的牵引，此产品用软性材料制成，上面有魔术贴可以用来调节松紧。适合腰部全形，贴身，舒适，拉力均匀，避免皮肤损伤，可持重25-40公斤。

腰椎牵引带-腰椎骨折腰椎增生腰间盘突出-黑龙江腰椎牵引带厂家

使用方法：

- 1、将腰椎牵引带两片分开，分别系于两端床头上（可用绳索连接牵引带子）。
- 2、患者躺在床上，将两片牵引带分别系牢固定在腰部、胸部，身体应尽量向上挺伸，将牵引带拉紧（系于床头的带子长短须一致）另一头加重物来调牵引力的大小根据医生建议选择合适的力度。
- 3.每天睡前牵引一次,时间以20-30分钟为宜,牵后即平躺休息,患者也可根据自己需要灵活调整时间和次数.10天为1疗程,2-3个疗程可明显见效,希望患者能够坚持牵。

腰椎牵引带-腰椎骨折腰椎增生腰间盘突出-黑龙江腰椎牵引带厂家

腰椎牵引带注意事项：

- 1、固定胸围带时，身体应尽力向上挺伸，胸围牵引带拉紧，以免无效牵引行程过长而影响效果。
- 2、牵引力量应以能忍受为宜，勿过度牵引，造成不良后果。
- 3、牵引完毕后，应卧床休息30-60分钟，以牵引效果。
- 4、牵引后，颈部或腰部若有酸困不适，疼痛感觉，卧床休息后自行消除。

产品规格：

大号长105厘米，中号长97厘米，小号长90厘米。

腰椎牵引带-腰椎骨折腰椎增生腰间盘突出-黑龙江腰椎牵引带厂家

注意事项：

1. 包括牵引力量、牵引时间、间歇牵引时的牵引问题时间及断续比例。
2. 每次牵引后，可根据患者牵引后的症状、体征的改变，相应调整牵引力量、时间，一般用渐增力量，根据牵引力的大小相应调整时间，牵引力大则时间要短。

腰椎牵引带-腰椎骨折腰椎增生腰间盘突出-黑龙江腰椎牵引带厂家