

多头胸带包扎固定方法A医用多头胸带A棉布多头固定带生产厂家

产品名称	多头胸带包扎固定方法A医用多头胸带A棉布多头固定带生产厂家
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:大中小 型号:多头胸带 材质:棉布
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

产品详情

多头胸带包扎固定方法A医用多头胸带A棉布多头固定带生产厂家

多头胸带的使用 对于肋骨骨折的患者，早期的胸带固定非常重要，不仅可以减轻疼痛，同时因为减少了骨折的相对运动，从而有利于肋骨骨折的愈合。

关于多头胸带的使用，患者应注意两点：

- 1、多头胸带固定的松紧度要适中，太紧会影响患者呼吸，太松则没有固定的作用。
- 2、白天用，晚上松。长期多头胸带固定对胸部的皮肤和血运有一定影响，一般在白天使用，晚上休息时可以松开。

产品名称：多头胸带

产品规格：此产品分大号 中号 小号

产品性能及特点：

- 1、多头胸带采用优质棉布。
- 2、对腹部起收紧、固定作用。

适用范围：适合胸部手术后的包扎、固定，医用胸带操作简单方便等优点。

注意事项：

- 1、 固定前检查固定带各部位是否牢固，固定时务必牢靠；
- 2、 依据患者的病情需要进行固定；
- 3、 家庭使用请遵医嘱。