

低温热塑板胸腰椎矫形器A低温热塑板胸腰固定器A低温热塑板胸腰骶固定支具

产品名称	低温热塑板胸腰椎矫形器A低温热塑板胸腰固定器A低温热塑板胸腰骶固定支具
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:大中小 型号:低温热塑板胸腰椎固定支具 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

产品详情

低温热塑板胸腰椎矫形器A低温热塑板胸腰固定器A低温热塑板胸腰骶固定支具

热塑型胸腰椎固定支具是一种特殊合成的高分子聚酯，经一系列物理和化学方法处理而成的新型高分子材料，它在室温（10 -30 ）干燥环境中分子处于稳定状态，在65-70 水中加热1-3分钟后可软化，在室温下3-5分钟可硬化。产品设计操作简单，生产管理严格、品质精益求精，制造外固定产品。

低温热塑板的优点：

- 1、 透气性：热塑型高分子夹板打孔设计，可用魔术贴固定，透气性能在各种材料里面佳。
- 2、 可塑性：热塑型高分子夹板具有延展性，特别适合关节部位的固定和塑形，贴合度更高。
- 3、 可重新塑形：热塑型高分子夹板加热后重新变软，可以重新塑形。满足了后期需要重新调整的需求。
- 4、 颜色规格多样：夹板可以做成各种颜色，同时可裁剪成各种形状，使用在手指、鼻子等末端部位。
- 5、 完全透x线：能清晰的看到骨折线，无任何遮挡。方便术后的诊断和观察。
- 6、 环保：本产品环保无毒无刺鼻气味，可生物降解。

使用方法，1、准备材料和工具，检查水箱，将水箱水温调至加热65-70

- 2、根据不同病情选择合适的板材进行裁剪。
- 3、医患选择适当的体位，讲明目的，要求患者配合（体表配戴氨纶纱套衬垫，以保护皮肤）。
- 4、将夹板放进65-70 的水中，加热1-3分钟，然后将软化好的材料从水中取出并擦干水分。
- 5、将板材放在患者需固定的位置塑型，可以用弹力绷带先简单的缠绕，然后再塑形。常温下可操作时间为3-5分钟（温度以不烫伤患者为宜），边缘部位可向外翻边，同时注意固定的角度。
- 6、如一次塑型不成功，可放入水中再次进行塑型，如肢体水肿消失后也可再次进行塑型（避免大幅度牵拉）。
- 7、待板材硬化成形后取下，修改边缘部分。
- 8、塑型达到固定要求后，加魔术贴固定即完成。对有伤口部位可作开窗处理。

注意事项

- 1、塑型时应尽量用指腹和鱼际部位进行塑型，塑形过程中应始终保持肢体的位置不变直至固化成型，边缘部位应向外翻卷成光滑圆边，以免磨损患者皮肤。
- 2、可用中性的肥皂凉水清洗产品，注意产品远离热源，例如：明火或微波炉等。如果温度超过51 以上，产品将会变形。