

医用灭菌袋封口机及灭菌密封袋

产品名称	医用灭菌袋封口机及灭菌密封袋
公司名称	北京赛百奥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区亮甲店130号华玉大厦505
联系电话	010-51282213 13601128645

产品详情

医用灭菌袋封口机及灭菌密封袋 一、医用不锈钢封口机 型号：DOYO-FK01 该医用灭菌袋封口机具有性能稳定、外形美观、操作方便、低返修率等优点，深受各大医院、诊所的亲赖。该产品在电压变化时，可调整至佳封口温度，外壳使用不锈钢材料制成，可防止腐蚀，便于清洁，内置双刃切割刀，切口平整。四大优点：专为你定制一款灭菌袋封口机！1、状态：一次塑封灭菌袋封口达到佳封闭状态2、温度：在电压变化时，可调整至佳封口温度3、外壳：防腐抗菌外壳：进口花纹不锈钢外壳，防蚀易清洁4、切口：切口平整，内置双刃切割刀，切口平整灭菌袋封口机 技术参数：产品名称：新款智能封口机电压：220V，50/60HZ额定功率：500W压痕宽度：10MM封口温度：200 ±10 大封口宽度：250MM外形尺寸：37×50×29cm（长宽高）产品实拍：细节展示：1、不锈钢平台：平台可以方便密封包装物，特别是在密封的物品中有重的东西的时候。2、卷筒支架：单个安装的卷筒支架可以节省空间。卷筒的灭菌包装直接安装在封口机上，用栓连在封口机后面。3、护罩：丙烯酸的护罩安装在便式卷筒支架或壁式卷筒支架的上面，以保护包装卷筒不沾上灰尘或油污。4、定位支架：固定支架从压板和密封板的后面插入，前面出去，这样可以对灭菌袋的尺寸随心所欲。5、手柄：手柄在压下直到感觉到有压力时候这样就产生了密封的作用6、固定支架：不锈钢固定支架，牢牢的紧扣住封口机，更大节省空间。我们的封口机不仅实用外表精致美观，造型优雅，医用不锈钢外壳，防蚀易清洁，使用便捷，不同规格的灭菌袋分类摆放在支架上，便于裁切，加热迅速，高效快捷操作说明：在操作本封口机之前，请先仔细阅读本说明书的所有安全和操作指示，本说明书将帮助您轻易享用该封口机给您带来的便利，使您用起来得心应手。使用时，请您严格按照操作规程，正确维护并进行合理的保养。请妥善保存说明书以备日后参考之用。避免安全隐患1、在搬运封口机时，应小心轻放，切勿用力过大。2、在使用时，将封口机始终向上，严禁侧放或斜放。3、请不要将水溅在封口机上，以防漏电。4、不要将封口机旋钮调至4以上以免影响封口质量。5、请不要随意翻滚机器。产品概述：（1）部件名称割刀手柄、压板、密封板、滚筒杠杆、电源开关、加热指示灯、温度调节旋钮、工作平台、套杆、光杆、支板。（2）电源线和封口压杆电源线接AC230V/50HZ电源。打开电源开关，封口大约需2分钟加热，当指小灯不再亮时表示机器可以正常使用。在封口机的左右两边都留有压杆安装孔。压杆可根据需要安装在封口机的左边或右边。（3）封口温度该封口机有非常精确的温度调节系统，可以通过旋转温度调节旋钮进行调节。在使用无菌包装材料（一面是尼龙，一面是纸）时，温度旋钮需设置在标有标示区域1/3处。先逆时针旋转旋钮，降低温度，再顺时针旋转慢慢提高温度，直到封口质量达到要求，以后在使用相同的包装材料时，就不用再调节了。该包装密封设备在对透明灭菌包装进行密封时，就可保持始终如一的高质量，纸的一面朝向密封口，管状箔片材料不能使用，因为该材料容易粘在密封杆上。日常使用：（1）密封步骤当加热指示灯熄灭后您可以开始封口操作了。注意！密封口板始终是高温的，请避免皮肤直接接触。为了避免因温度过高或过低而

使密封效果不理想，应将旋钮旋至3至4之间。将透明灭菌包装放入到压板和密封板之间，纸的一面朝下。压下压杆直到感受到有压力，这样就产生密封作用。要确保始终有密封压力。注意！如果杆没有充分压下，密封压力就达不到，密封的质量就要受到影响，在密封期间压杆不能放松，这一过程大约要维持4秒钟。将包装袋裁下将杆子返回到原来的垂直位置时，密封结束，如果这时主电源开关没关闭，可继续密封操作。（2）裁下包装将割刀手柄快速拖动，切割刀片划过包装袋，割断包装袋。（3）使用卷筒的包装将卷筒放置在支架上，从压板的密封板的后面插入，前面出去纸的一面必须朝下维护：（1）更换压轨注意！先关掉开关，再拔掉主电源，然后等封口机冷却下来再进行操作，以防止烫伤（这一点在修理，保养和维护时非常重要）。旋转割刀手柄。旋松四个快速螺丝，拿掉压板上的盖子。注意！刀片非常锋利！压板现在可以看到了。旋下板上的螺丝，再拿住另一边，侧着板拉出来。插入新的压板，旋上螺丝。当把盖子放回原处时，要确定拖动刀片的轴能沿着开口处自由滑动。后将割刀手柄旋回去。（2）更换或翻转刀片旋掉割刀手柄。旋松四个快速螺丝，拿掉压板上的盖子。将刀片上的螺丝拧下换一个的，并用螺丝旋回原来的位置。当把盖子放回原处时，要确定拖动刀片的轴能沿着开口处自由的滑动。后将割刀手柄旋回去。

二、医用智能封口机 型号：DOYO-FK02操作简单、安全可靠、节省空间、智能系统技术参数：电压：230V，50/60HZ额定功率：300W压痕宽度：12MM大封口宽度：300MM包装尺寸：50×40×21CM选择我们的理由本医用灭菌袋封口机是灭菌辅助系列产品之一，深受广大用户的青睐。内置双刃工业用切割刀片，切口平整具有很强耐磨性，使用寿命长主体结构：产品细节：1、省力封口杆：内置不锈钢压簧，弹力十足、把手按压轻松省力2、新款加热棒：使用PTC恒温加热棒，加热迅速，持久耐用。图右边为普通加热棒3、耐高温硅胶：新款厚实耐用，封口整齐不会老化，旧款高温布封口有偏差，需定期更换4、加热指示灯：加热时绿灯闪烁，加热完成后绿灯常亮，可以开始封口5、压痕平整：封口压痕12MM，边缘整齐美观无误差使用说明：注：在封口时若6秒后仍没有松开把手，机器会报警长鸣同时黄灯常亮进行提示。若半小时之内没有任何操作，机器会自动断电保护，需要重新扳回把手后才能正常工作产品展示：三、医用灭菌袋自封灭菌消毒袋：真材实料、多种规格可选、细腻精美高颜值实力派、怎能不爱健康环保、无毒无味效果显著、消毒灭菌应用广泛、型号齐全匠心良心、足质足量1、足质足量、匠心加良心我们的灭菌袋只用好纸好膜，200米足量的。劣质灭菌袋做工粗糙、质量低劣，实际只有180米左右2、边缘处理、精致细腻开口处处理齐整，光膜包装，防水防潮。请认准卫生许可证号（仿品无证无号）3、制造、多种规格我们持卫生许可证生产，杜绝假货仿货。精湛工艺、给您提供多规格产品4、压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌Steam—高温高压蒸汽121度或134度5、Ethylene oxide—环氧乙烷灭菌 6、细节对比、一看便知我们的灭菌袋与劣质灭菌袋，材质更加细腻，区别于劣质的粗糙

产品信息：产品名称：灭菌包装袋有效日期：两年两侧封口：各10MM适用灭菌：压力蒸汽灭菌/环氧乙烷灭菌适用范围：医疗器械、美容用品包装、医院、实验室用品消毒包装使用方法：1、请根据灭菌物品大小选择合适尺寸的包装袋（体积不超过包装袋3/4为宜），将物品置于包装材料内密封2、包装袋热封的温度为180 -200 ，压力为1KG/M2-3KG/M2，延迟烫合时间为3-8秒3、压力蒸汽灭菌处理后，指示标记由蓝色变为黑色；环氧乙烷灭菌处理后，指示标记由红色变为黄色4、将灭菌好的产品放置于干燥、避光和洁净区储存、待用注意事项：1、本产品适用于蒸汽压力灭菌或环氧乙烷灭菌，但不适用于超过140 干热灭菌产品的包装2、本产品应于20 -25 ，相对湿度小于50%的条件下存放3、使用前检查包装袋密封完好性，如有破损，请勿使用4、本产品为一次性使用，使用后应在规定的地点填埋或在监控下焚烧5、本产品不用于指示灭菌效果6、包装袋常温常湿下保质期2年；灭菌后保质期为180天订货信息：品名规格灭菌袋5cm×200m5.5cm×200m7.5cm×200m10cm×200m15cm×200m20cm×200m25cm×200m30cm×200m更多产品资料及其它生命科学仪器相关设备请登录赛百奥科技www.cbio21.com查询