

## FYL-YS-280L医用液体恒温箱 37 生理盐水冲洗液加温箱

产品名称	FYL-YS-280L医用液体恒温箱 37 生理盐水冲洗液加温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	69656.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

### 产品详情

FYL-YS-280L医用液体恒温箱 37 生理盐水冲洗液加温箱公司说明-

北京福意电器有限公司拥有优异的经营设备，强大的科研队伍，业的人才，现代化的管理以及完善的售后体系。其产品设计匠心独运，工艺精良，用料考究，外观豪华气派，恒久，稳步。本公司主要产品有：医用冰箱、冷链运输箱、低温试验箱、实验室冰箱、医用加温箱、手术室保温柜等一系列产品。

FYL-YS-280L医用液体恒温箱 37 生理盐水冲洗液加温箱用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

FYL-YS-280L医用液体恒温箱 37 生理盐水冲洗液加温箱产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

FYL-YS-280L医用液体恒温箱 37 生理盐水冲洗液加温箱相关-临床上对接受手术后出现低体温症状的患者实施术中冲洗液体加温干预措施的临床效果.方法:采取随机实验法,以我院收治的100例接受全身的患者为研究对象,随机均分为实验组和对照组,对对照组患者实施常规加温方法,对实验组患者实施术中冲洗液体加温方法,观察两组患者在接受护理干预后的临床恢复情况.结果:经过一定时间的护理干预后,实验组患者的苏醒时间、术后低温发生率、平均住院时间和术后切口感染率明显低于对照组,结果具有显著差异.结论:在临床上对接受手术后出现低温症状的患者实施术后冲洗液体加温方法,可以降低患者的苏醒时间、术后低温发生率、平均住院时间以及术后切口感染率,在临床上具有广泛的推广意义.FYL-YS-280L医用液体恒温箱 37 生理盐水冲洗液加温箱