

医用甘露醇结晶恒温箱 立式分层溶解箱0-100 可调

产品名称	医用甘露醇结晶恒温箱 立式分层溶解箱0-100 可调
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	70111.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用甘露醇结晶恒温箱 立式分层溶解箱0-100 可调公司说明-

北京福意电器有限公司是一家业的恒温冷藏保存设备经营企业，拥有业的团队、网络营销平台，经验丰富的售后团队。公司主要经营医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱。我们长期为医疗卫生、科研院所、高等院校、化工、制药、生物、食品等域提供的解决方案。

医用甘露醇结晶恒温箱 立式分层溶解箱0-100 可调用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

医用甘露醇结晶恒温箱 立式分层溶解箱0-100 可调产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用甘露醇结晶恒温箱 立式分层溶解箱0-100 可调相关-正手术期低温是和外科手术 期常见的并发症。在全麻手术中,由于药对机体体温调节功能的抑制等因素,术中容易发生低体温。低体温可导致多种并发症诸如凝血机制障碍、伤口愈合时间 延长、抗感染能力下降、药物代谢速度降低等[1],从而影响术后恢复及预后。医用甘露醇结晶恒温箱 立式分层溶解箱0-100 可调