

医用恒温箱用于术中各类液体药品升温保温规范手术

产品名称	医用恒温箱用于术中各类液体药品升温保温规范手术
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	67865.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用恒温箱用于术中各类液体药品升温保温规范手术公司说明-

北京福意电器有限公司拥有优异的经营设备，强大的科研队伍，业的人才，现代化的管理以及完善的售后体系。其产品设计匠心独运，工艺精良，用料考究，外观豪华气派，恒久，稳步。本公司主要产品有：医用冰箱、冷链运输箱、低温试验箱、实验室冰箱、医用加温箱、手术室保温柜等一系列产品。

医用恒温箱用于术中各类液体药品升温保温规范手术用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

医用恒温箱用于术中各类液体药品升温保温规范手术产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用恒温箱用于术中各类液体药品升温保温规范手术相关-低体温对机体的影响

1寒战的发生率增加 人体体温调节系统通常保持体温接近 37℃，患者体温约降低 1℃

，就会出现寒战，在全麻恢复过程中，没有进行有效复温的患者，寒战发生率约 40%，寒战引起的肌肉增加使耗氧量增加 486%，机体耗氧增加心血管系统供血需求亦会增加

，易使心脏病患者出现心律失常、心肌缺血。2对心血管的影响 轻度低温时交感神经兴奋，心率加，心肌收缩力增强，心输出量增加

，外周血管收缩。外周阻力增加和血液黏稠度升高，会增加心脏做功

，可能导致心肌缺血和心律失常。3对神经系统的影响 低温对神经系统的影响极其明显

，体温每下降 1℃，脑血流量减少 6%~7%，出现意识障碍、

判断力损害和模糊。医用恒温箱用于术中各类液体药品升温保温规范手术