

人体平衡功能测试仪 KY传感

产品名称	人体平衡功能测试仪 KY传感
公司名称	合肥荣事达科源传感系统工程有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:KY传感 型号:KY-1112型 类型:物理教学仪器
公司地址	中国 安徽 合肥市蜀山区 合肥市长江西路2221号 安徽循环经济技术工程院A座607号
联系电话	86 0551 5393709

产品详情

品牌	KY传感	型号	KY-1112型
类型	物理教学仪器	材质	不锈钢
测量范围	0-2000	适用范围	体育院系

一、基本结构及技术特点

人体平衡仪测试系统包括一个平台和一台计算机，按其功能划分，主要由三部分组成：平台部分、数据采集部分、综合处理系统。

技术特点：

1. 实时采集和记录患者压力中心的变化并显示四种数据曲线；
2. 配置功能强大的数据分析软件；
3. 采用高精度的单维力传感器；
4. 采用12位isa总线的数据采集板；

1. 硬件安装

在未通电情况下

连接信号线：信号线一端为9芯，一端为25芯，9芯的一端插平台的9芯插座上，25芯的一端插计算机并口；

连接电源线：接220v电源。

1. 软件安装

打开光盘中的setup.exe文件，在welcome对话框中选择next按键，进入soft license agreement对话框；

选择yes按键，进入user information对话框，填写用户信息，其中serial可任意填写，但必须要填写，选择next按键进入choose destination location选项对话框，按下browse按键；

在弹出的对话框choose folder中的path一栏中选择要安装路径即，按下ok键，回到choose destination location对话框，按下next按键；

进入setup type对话框任选一项，然后按下next按键，进入select program folder对话框，选用系统默认设置，按下next按键，即可开始安装；

在安装结束后弹出setup complete对话框，选择finish按键结束安装即可完成整个系统的安装；

系统安装完成后将生成注册表信息，以便于用户卸载程序使用；卸载时可通过控制面板中的添加或删除程序来完成。

四、操作

依次打开pc机、显示器、打印机的电源开关,和平台的电源开关,待平台通电30分钟后,可开始测试。

注意事项

1. 平台通电30分钟后，方可进行正式测试。
2. 在填写“用户基本情况”表时，请将各项填写完整。
3. 严禁在平台上蹦跳和站在平台的边缘处，以防摔下；
4. 系统使用结束后，请及时关闭电源；
5. 严禁自行拆卸；