

福意联医用加热箱FYL-YS-310L医用保温柜加温冲洗液

产品名称	福意联医用加热箱FYL-YS-310L医用保温柜加温冲洗液
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	68967.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

福意联医用加热箱FYL-YS-310L医用保温柜加温冲洗液公司说明-

北京福意电器有限公司以、经营、销售为一体，公司业经营医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等系列产品，数百个品种的产品得到了广大用户的一致好评。北京福意电器有限公司拥有雄厚的力量，齐全的检验设备，从而保证了优良的产量。另外业的售后也为本厂赢得了信誉。本着“质量取胜，诚信为本”的售后，我厂热忱各方朋友合作！

福意联医用加热箱FYL-YS-310L医用保温柜加温冲洗液用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

福意联医用加热箱FYL-YS-310L医用保温柜加温冲洗液产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

福意联医用加热箱FYL-YS-310L医用保温柜加温冲洗液相关-

冬季是低体温症发病的高峰期，低体温症发病的主要原因是有些人体内产热少，体温调节功能差。特别是老年人和婴儿，对温度的变化不那么敏感。即使室内温度低也可能感觉不到。导致保温防护能力差，当体温下降到35℃以下时，就会发生低体温症。手术中的患者优良容易引起低体温这一常见的并发症，特别是长时间的大型手术，多发生在手术中，发生率为60%-80%。低体温可能影响心血管系统、增加手术部位的感染风险、增加失血和输血要求和增加寒战的发生率。手术期间引起低体温的原因有以下几点：1.引起的体温调节分布，1小时后，体核温度降低1-1.5℃。2.大多数手术室都保持在22℃-24℃的低温状态。3.腹部和胸部手术中打开体腔，皮肤的长期暴露，4.注射冷的静脉输液和血液制品，温度4℃。

福意联医用加热箱FYL-YS-310L医用保温柜加温冲洗液