

使用四肢约束带的注意事项

产品名称	使用四肢约束带的注意事项
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:均码 型号:四肢约束带 材质:绒布
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

产品详情

使用四肢约束带的主要事项

四肢约束带

产品规格:均码,

使用方法:将约束带置于使用部位后,将绑带或搭扣固定,伸缩调整至合适.

颜色说明由于产品出货量大约束带的颜色一般是深蓝色和白色,颜色有要求的客户可以定制

根据病人的情况选择合理的约束部位,一般来说约束部位在手腕和踝关节。

4、使用约束带时现检查四肢约束带及配件情况,确认产品完好。

约束带的临床使用主要是针对不能配合的病人进行保护性的约束。使用前应与患者直系家属充分沟通约束带使用的利弊,评估约束带使用的必要性,并签订知情同意书。可以让烦躁不能配合或长期卧床患者的肢体处于功能位置,并协助病人翻身避免局部压疮行成;原则是保证病人安全舒适没有合并的损伤。使用约束带时固定部位下应垫有衬垫,固定需松紧适宜。

在四肢部位的约束带应及时观察约束部位的血液循环,包括皮肤的颜色,温度活动及感觉,每两小时左右进行松解1次,并改变病人的姿势,给予受约束的肢体适度运动,必要时进行局部按摩,促进血液循环。