

导尿管 环氧已烷

产品名称	导尿管 环氧已烷
公司名称	江苏省华星医疗器械实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	扬州市广陵区头桥镇通达路328号
联系电话	0514-87486999

产品详情

药（械）准字	苏食药监械（准）字2008 产品注册证 第2660295号	苏食药监械（准）字2008 第2660295号（更2008-102 ）
灭菌方式 一次性使用	环氧已烷 是	有效期 24（月）

一、预期用途:供临床导尿用。

二、产品规格：一次性使用无菌导尿管采用天然乳胶胶乳经浸渍、硫化等工艺生产制成，产品按管腔数，分为单腔、双腔、三腔及多腔，按有无球囊，分为带球囊和不带球囊两种，按使用性别，分为男用型和女用型，按使用对象年龄，分为小儿用和成人用。按照管身外径的不同，分为2.0~10.0（规格：6fr、8fr、10fr、12fr、14fr、16fr、18fr、20fr、22fr、24fr、26fr、28fr、30fr），产品经环氧乙烷灭菌出厂。

三、产品组成

一次性使用无菌导尿管单包装内可以选配限流夹（卡）和支撑导丝各一只，限流夹（卡）用于在插管、使用中开关导尿管的出液，支撑导丝主要用于导尿管插管时插在导尿管内，为插管提供方便。

四、使用方法：

1. 打开包装，取出无菌导尿管；
2. 按照操作规程，首先对导尿管的管身及气囊进行检查；
3. 然后按照导尿术无菌操作规程进行置管；
4. 使用结束后，拔出导尿管，按照医院或环保要求进行处理。

五、本产品无明显禁忌症，仅限有操作经验的专业医护人员临床使用。

六、使用注意事项

1. 本产品采用环氧乙烷灭菌，使用前应注意检查产品包装上灭菌标志及灭菌有效期。
2. 应按操作规程进行操作，穿刺时应动作轻柔，并适当在导管上加润滑油（请勿使用含有石油基质的润滑剂），以减少对患者尿道的损伤，使用中应按照无菌操作规程。
3. 产品留置期间应加强护理，如长期留置，单根产品留置时间应不得超过7天，以减少发生感染的几率。
4. 包装破损，严禁使用。
5. 本产品仅限一次性使用，用后销毁。
6. 灭菌有效期三年，生产日期见包装，灭菌日期见灭菌标签。