

Harmonic强生 GEN11 超声刀主机维修

产品名称	Harmonic强生 GEN11 超声刀主机维修
公司名称	李沧区医立咨询服务中心
价格	.00/台
规格参数	品牌:强生 型号:GEN11 产地:美国
公司地址	虎山路20号院2号楼2层
联系电话	13361285885

产品详情

超声器械的清洗：

- 1、不可随便使用其他消毒剂，以免腐蚀器械。
- 2、清洗使用或者移动器械时要轻拿轻放，避免重压或掉落地面使变形。
- 3、刷洗器械的小毛刷应一用一消毒，酶洗液一用一更换。
- 4、清洗头时不能用力擦、刷洗，以免损伤绝缘层。
- 5、手柄的连线不可浸泡在液体中可用湿布擦拭干净。
- 6、清洗干净后用软布擦干。

超声器械的保养：

- 1、安装时不能使用，应用扭力扳手将其卡紧。
- 2、测试和使用过程中不要触摸头，不要碰到金属。在没有钳夹组织时踩脚踏，头要张开，不要闭合空踩，使用时把组织钳夹在头前的大部分。3、手柄连线盘放收藏时应保持线圈的直径达15—20 cm，不可扭曲、折叠，防止连线被折断。
- 4、使用每隔10 min—15 min时，把头浸在水中踩脚档并轻轻抖动，把头的组织和血块冲出，以免堵塞。
- 5、清洗10 min芯时用软布轻擦，切忌用刷子刷，以免损伤硅胶环，影响功率。
- 6、不要在血液中使用，否则对头损伤很大。

7、持续工作超过10s对头的损伤是大的，一般7s就会断开，尽量放开，再二次工作。

8、工作时绝、对不允许旋转头，否则对头损伤很大。组织游离好后再夹持，不要夹持太大块组织。

9、分离组织后，要及时用湿纱布抹净头上附着的焦痂及组织，并将头放入水中震荡清洗，保持清洁才能保证输出功率。

超声头一些常见故障：无咬合力、钳头掉、断、铆钉脱落、绝缘处脱落、烧焦、按键失效、头断裂等。

故障处理：更换塑料连接孔、更换芯、装铆钉、更换绝缘片、更换按键、更换外壳。

现针对STORZ史托斯、Stryker史赛克、WOLF狼牌、AESCULAP蛇牌、OLYMPUS奥林巴斯、Erbe爱尔博、强生、Smith&Nephew施乐辉等品牌提供维修服务！

软镜维修：胃镜维修、肠镜维修、胆道镜维修、纤维支气管镜维修、维修小儿支气管镜、纤维喉镜维修、指肠镜维修、输尿管软镜维修等。

硬性内窥镜维修：腹腔镜维修、关节镜、经皮肾镜、膀胱镜、椎间孔镜、输尿管镜、宫腔电切镜等。

超声及手柄维修：超声主机维修、超声手柄维修、超声手柄次数刷新、超声头维修等。

动力系统维修：狼牌动力刨削手柄维修、动力主机维修、动力接头维修等。

手术器械维修:操作手件、镜鞘、分离钳、电凝钳、钛夹钳、电凝钩、穿刺器、气腹针、、手术剪、异物钳、活检钳、输尿管肾钳等；

摄像系统维修：摄像头维修、摄像主机维修、气腹机维修、冷光源维修、导光束维修等。