

Smith Nephew施乐辉REF72200617动力手柄维修

产品名称	Smith Nephew施乐辉REF72200617动力手柄维修
公司名称	李沧区医立咨询服务中心
价格	.00/把
规格参数	品牌:施乐辉 型号:REF72200617 产地:英国
公司地址	虎山路20号院2号楼2层
联系电话	13361285885

产品详情

动力刨削手柄常见故障及解决办法：

一、电缆线故障：主机无法识别手柄、电缆线接口接触不良、电缆线表皮破损、电缆内阻变大、氧化。

维修方法：更换或者维修电缆线。

二、按键无法使用

解决方法：维修更换按键。

三、电机卡死：手柄电机故障，常见是电机进水引起生锈导致卡死、转动过慢、电机发热异常等。

维修方法：维修或者更换电机。

四、轴承故障：轴承进水引起生锈、卡死或者断裂。

维修方法：维修更换轴承。

五、头卡不住，夹头断裂。

动力系统常见故障：

手柄无法转动、转动速度过慢、温度过热、声音异响等，主要为手柄电机进水引起生锈及电机烧坏、老化等 按键无法使用，主要为开关传感器等零件及密封防水结构，多为进水引起零件损坏。电缆线故障，多为接触不良，造成内阻变大、氧化、外皮破裂、线缆接口故障引起。

动力系统的清洗与保养

（一）清洗 1、初洗。手术完成后,利用流水冲洗器械表面血污,打开肘关节部位,钳夹部位用毛刷刷洗,再利用高压水将关节、管腔等部位血渍进行反复冲洗。2、酶洗。将初洗后的器械放入多酶液中浸泡5min,取出后用流水洗净,再将其放入多酶液的超声波器械清洗机内清洗8min,消除各个不易清洁部位蛋白质、血液、脂肪等有机物,流水洗净后再用毛刷反复擦洗。然后置入酸化水浸泡2 min,随后用蒸馏水洗尽,管腔部位用高压水冲洗,置入医用润滑液浸泡 1 min,之后用吸水软布擦干,并用高压气、吹干。

（二）保养 1、术后要关闭仪器,切断电源,避免突然间通电和断电造成仪器损坏。定位保管,外加防尘罩,减少搬动次数,避免损坏。
2、镜面等要用防尘纸轻轻擦拭,避免磨损和碰撞;器械要轻拿轻放,以免掉落或丢失。
3、每月进行一次除锈和润滑保养,完成后使用专用润滑剂喷洒在仪器表面。
4、发现损坏或螺丝松动等要及时处理,保证手术所需。

（三）结果 采用以上方法进行史赛克动力系统清洗和保养,期间共完成骨科手术792例,未出现1例因器械引发的并发症。在每月进行器械检查时,并未在内镜上发现污垢,进行细菌培养,结果呈阴性。且器械使用寿命得到延长,整体管理效果较好。

医立咨询服务中心致力于为事业发展提供安全可靠的医用装备和快捷周到的技术支持，致力于延长医疗设备正常使用寿命和降低医疗成本。现针对STORZ史托斯、Stryker史赛克、WOLF狼牌、AESCULAP蛇牌、OLYMPUS奥林巴斯、Erbe爱尔博、强生、Smith&Nephew施乐辉等品牌、针对动力系统、手术器械、医疗电子设备、超声&探头、软镜、硬镜等项目，提供咨询、保养、维修、保修等服务。欢迎咨询！

现针对STORZ史托斯、Stryker史赛克、WOLF狼牌、AESCULAP蛇牌、OLYMPUS奥林巴斯、Erbe爱尔博、强生、Smith&Nephew施乐辉等品牌提供维修服务！

软镜维修：胃镜维修、肠镜维修、胆道镜维修、纤维支气管镜维修、维修小儿支气管镜、纤维喉镜维修、指肠镜维修、输尿管软镜维修等。

硬性内窥镜维修：腹腔镜维修、关节镜、经皮肾镜、膀胱镜、椎间孔镜、输尿管镜、宫腔电切镜等。

超声及手柄维修：超声主机维修、超声手柄维修、超声手柄次数刷新、超声头维修等。

动力系统维修：狼牌动力刨削手柄维修、动力主机维修、动力接头维修等。

手术器械维修:操作手件、镜鞘、分离钳、电凝钳、钛夹钳、电凝钩、穿刺器、气腹针、手术剪、异物钳、活检钳、输尿管肾钳等；

摄像系统维修：摄像头维修、摄像主机维修、气腹机维修、冷光源维修、导光束维修等。