

# 便携式家用制氧机保健型 仁新

产品名称	便携式家用制氧机保健型 仁新
公司名称	仁新节能环保设备（上海）有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:仁新 工作电压:220（V/Hz） 额定功率:250VA（W）
公司地址	青浦区北青公路7523号
联系电话	39815612-1001 15921668926

## 产品详情

品牌	仁新	工作电压	220（V/Hz）
额定功率	250VA（W）	电源频率	50（Hz）
氧气浓度	35~45（%）	氧气流量	1~2（L/min）
运行噪音	45（dB）	适用面积	30（m <sup>2</sup> ）
环境温度	0~40（℃）	环境湿度	60（%）
重量	6.5（kg）	产地	上海
适用送礼场合	广告促销、颁奖纪念、展销会、员工福利、其他		

portable medical

oxygen generator

便携式医用氧气机

智能型设计

国际标准高品质部件

### 一、用途：

主要提供医疗和保健用氧。医疗吸氧可配合治疗心脑血管疾病、呼吸系统疾病、慢性阻塞性肺炎等疾病，以及严重缺氧病症的康复。长期保健氧疗可以改善人体的供氧状况，缓解神经疲劳，改善大脑供氧状况，调节脑神经系统功能，提高记忆力、思维能力、学习和工作效率；吸氧可提高运动耐力和生命质量，减少污染和恶劣环境下对身体的危害，在一定程度上可增强新陈代谢，延缓衰老。广泛应用于医院、基层医疗、保健机构、家庭医疗、疗养院、养老院、矿山、公共氧吧、美容养颜、家庭保健、高原缺氧

地区等领域。

## 二、工作原理：

医用氧气机以干燥洁净的空气为原料，运用医用分子筛的吸附特征，采用变压吸附原理制取医用氧气。工作时将空气中21%氧气与78%氮气及1%其他气体经过压缩后轮换分配到分子筛填料床上，通过自动控制器控制电磁阀的启闭完成加压吸附和减压解吸的过程，达到氧气和氮气的分离，并使这个过程不断重复，从而获得连续的高浓度氧气输出。氧气纯度、安全性和清洁度完全符合国家医药管理局yy/t 0298-1998标准规范要求。是目前世界上最先进、最安全可靠又简便的制氧方法。

## 三、特点：

I拥有自主知识产权的多项专利技术应用，整机达到国际领先水平；

I采用国际标准的高品质部件，以满足最佳的吸附效果；

I采用特殊的旋转式流体分配器技术及独创的分子筛装填技术，彻底消除分子筛粉化现象，使氧气机的使用寿命大为提高；

I采用先进的风道设计和多级分散消音系统，噪音更低；

I全塑外壳，数码视窗；具有累时、定时关机功能；

I特别采用断电报警、超压保护及过热保护设计，使用更安全；

I结构设计新颖，制氧快、氧产量大、耗能低、使用便捷；

I外形美观、体积小、重量轻、便于移动；

I集制氧供氧为一体，既克服了使用氧气袋、氧气瓶需要先储氧后供氧的不便，也免除了使用化学制氧器需要不断投放制氧药剂的麻烦，而且氧气流量充足，在有电力供应的地方均可使用。

## 四、技术性能参数：

型号	ly-1	ly-3	ly-5
电源	ac220 ± 22v , 50 ± 1hz		
输入功率	350va		
氧气浓度	40%		
氧气流量	~1 l/min	~3l/min	~5l/min
输出压力	0.04~0.05mpa	0.04~0.06mpa	0.04~0.07mpa
运行噪音	45db (a)		
外型尺寸	45 × 37 × 68mm	45 × 37 × 68mm	45 × 37 × 68mm
包装尺寸	50 × 42 × 73mm	50 × 42 × 73mm	50 × 42 × 73mm
净量	18kg	20kg	25kg
附件（备件）	鼻氧管1套 空滤芯1套 防护罩1套 湿化瓶1个 湿化瓶吸入接头1个 使用说明1套 用户登记表1张 熔丝管2只 防震垫1块		

## 五、简便操作：

按照使用说明书要求注入适量纯净水，连接好湿化瓶和吸氧管，然后打开电源，您即可在1-2分钟内得到高纯度的纯净氧气。如果需要，氧气机可长时间连续供给高纯度氧气。日常维护十分简便，仅仅需要定期清洗湿化瓶，过滤网和更换过滤器或过滤器滤芯即可。