

S型放疗定位膜-放疗膜-低温热塑性头颈肩膜-面膜-美岑高端雪青膜

产品名称	S型放疗定位膜-放疗膜-低温热塑性头颈肩膜-面膜-美岑高端雪青膜
公司名称	广州人福医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美岑 厚度:2.4mm, 3.0mm 包装:10片每箱
公司地址	广州市南沙区番禺大道南173号2栋
联系电话	8602038391509 13535540562

产品详情

广州人福医疗生产的美岑牌S型放疗膜采用膨涨拉丁式的固定方法固定于底板上，是头部肿瘤放射治疗中常用的材料之一，其塑形、固定操作方便、成型美观，是放疗常用的定位膜之一。由于塑形时拉伸较大，材料厚度易变薄，固定效果会受到一定的影响，一般选用孔径小、网孔比例小的材料更为适宜。

[产品结构]：定位膜是由低温热塑板裁成一定的形状和其边缘处安装相应的硬质塑料边条组成。塑料边条作为将放疗膜固定于治疗床上之用。

[使用方法]：

- 1) 将定位膜放于65℃热水中加热，使其完全透明软化，随即取出。
- 2) 用干毛巾将网孔中的热水吸取后，将软化材料放置固定部位匀速拉伸，并将边条固定于固定架上，之后对人体局部塑形，塑形操作时间为1-3分钟。
- 3) 塑形完成后，置15-20分钟即材料冷却完全硬化定型后，取下定型的医用热塑性材料，操作完成。

[注意事项]：

- 1) 恒温水箱的水温应保持在65℃左右，不得过高。当材料完全透明时表示完成软化，即可取出塑形。
- 2) 在加热软化中，不可将未完全软化的材料取出塑形，影响塑形效果。

3) 塑形完成后，勿将未完全硬化定型的材料取下，导致材料发生微量收缩，医用热塑性材料变形，二次固定时，会发生医用热塑性材料过小或过紧，使病人产生不适感，影响治疗。

4) 重复塑形是针对一个病人所进行的二次或多次的重复塑形固定，不可将已使用过的放疗定位膜用于其他病人的治疗过程中。

[储存条件]：产品应于10 -40 、干燥、清洁的室内贮存，贮存时产品距热源不小于0.5M。

产品特点：

舒适性好，更低的收缩率，适中的塑形时间，符合人体工程学设计，独特化学防粘，雪青色有助缓解患者紧张情绪。