

# 爱谨生物 AJB202 牛病毒性腹泻病毒抗体检测卡

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 爱谨生物 AJB202 牛病毒性腹泻病毒抗体检测卡        |
| 公司名称 | 杭州爱谨生物科技有限公司                     |
| 价格   | 500.00/盒                         |
| 规格参数 | 品牌:爱谨<br>规格:20T/盒<br>产地:杭州       |
| 公司地址 | 浙江省杭州市钱塘区白杨街道20号大街578号1幢1楼(注册地址) |
| 联系电话 | 13588116846                      |

## 产品详情

### 【主要成分与含量】

| 组分            | 数量  | 规格      |
|---------------|-----|---------|
| 牛病毒性腹泻病毒抗体检测卡 | 20袋 | 1条/袋    |
| 样本处理液         | 1瓶  | 4.0mL/瓶 |
| 40 $\mu$ L滴管  | 20个 | 1个/袋    |
| 说明书           | 1份  | /       |

【使用样本】血清，血浆。

### 【用法与判定】

#### 1用法

##### 1.1样本处理

1.1.1 血清：在室温下血液自然凝固10-20分钟后，离心10分钟左右（3000转/分），收集上清液为待检样本。

1.1.2 血浆：应根据标本的要求选择EDTA，柠檬酸钠或者肝素作为抗凝剂，混合10-20分钟后，再离心10分钟（3000转/分），收集上清液为待检样本。

##### 1.2操作步骤

(1) 从包装袋中取出试纸条，加样孔(S)和检测窗口朝上平放在桌面。

(2) 用吸管吸取待检样本，滴加1滴（约40 μL）到加样孔（S）中，再滴入2~3滴样本处理液（约80 μL~120 μL），并开始计时。

(3) 仔细观察测试区窗口中T线（检测线）和C线（质控线）显色反应。

(4) 静置5~10分钟后观察结果。

## 2 判定

### 【注意事项】

(1) 包装破损、过有效期的，请勿使用。

(2) 试纸卡贮藏与运输过程中不可冷冻，避免阳光直晒。

(3) 撕开铝箔袋取出检测试纸卡后应立即使用，防止试纸卡受潮。

(4) 请勿混用不同批次的样品缓冲液，且试纸卡为一次性消耗品，不可重复使用。

(5) 使用过的试纸卡及检测样品等应视同污染物，应根据相关法规要求妥善处理。

【规格】 20头份/盒

【贮藏与有效期】 2~30 阴凉干燥处保存，有效期为18个月。

【生产企业】 杭州爱谨生物科技有限公司

浙江省杭州市钱塘区白杨街道20号大街578号1幢1楼