

西门子172助听器 西门子

产品名称	西门子172助听器 西门子
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

药（械）准字

苏食药监械（准）字2005 品牌
第2460509号

西门子

型号

172

【商品型号】 西门子172型盒式助听器

【生产商】：西门子

【功能特点】

大功率<100db

随身听式袖珍型

新型的onh开关

【相近型号的主要性能指标】

	172型	176型
声增益	59db	59db
*大声输出	131db	131db
低频限制	130hz	130hz
高频限制	4800hz	4800hz
谐波失真	7%	7%
等效噪声	32db	32db
线圈灵敏度	-	109db

工作电压	1.5v	1.5v
工作电流	10.8ma	10.8ma

国际卫生组织将听力损失分级如下：

平均听力损失小于25分贝为正常；
 平均听力损失介于26~40分贝为轻度听力损失；
 平均听力损失介于41~55分贝为中度听力损失；
 平均听力损失介于56~70分贝为中重度听力损失；
 平均听力损失介于71~90分贝为重度听力损失；
 平均听力损失大于91分贝为极重度听力损失。

如果您没有听力图的话，粗略的估计一下：

- 1、正常的语言交流没有问题，只是偶尔的听不清楚他人的对话，那么平均听力损失一般不超过45分贝；
- 2、听别人说话要注意听，别人声音小时会听不清，看电视开很大音量，那么平均听力损失大约在50~55分贝；
- 3、别人一定要很大声说话才能听清，那么一般来说，听力损失不小于60分贝了。

也可以采用下面的实际声音进行评估听力损失程度（请在听到声音里打）

- 1.树叶沙沙声，鸟叫声（10分贝）
- 2.流水声（10-20分贝）
- 3.悄悄话（在耳边,15-25分贝）
- 4.手表嘀嗒声（30-40分贝）
- 5.普通说话声（40-60分贝）
- 6.大声说话声（距离1-2m,70-80分贝）
- 7.大声说话声（在耳边,80-100分贝）
- 8.狗叫声（60-80分贝,低频音）
- 9.电话铃声（80-90分贝,高频音）
- 10.鞭炮声（100-120分贝）

注：1,如果能听到上述全部声音，您不需要配戴助听器

2,如果1-4听不到，5-9部分听不清或听不见，您需要配戴助听器

3,如果只有10的声音能听到，您需要配戴助听器，请另选功率更大的助听器

【怎样使用助听器】

1、将耳机和导线与助听器主机相连

将导线另一端的扁平插头插入耳机侧面的插孔

将硬塑料接头与耳机头口紧，然后选择适当的耳塞与之相连，（即：按外道的大小选择耳塞头）

2、放入电池

不可大力的将盒盖开启。于缺口处手指轻轻上掀，打开盒盖，将一枚aa型（5号）干电池置入电池仓内。干电池上的“+”号必须对应电池仓内的“+”号必须对应电池仓内的“+”号。

将带子压在干电池下方，以方便以后取出干电池，小心吧盒盖关上。

3、操作o-n-h开关

n位置：正常位置麦克风接通

h位置：降低频噪音

o位置：助听器关闭

4、音量控制

附有使用简单的音量旋钮。音量大小可随意调节，从位置1（*低音量）到位置4（*高音量）

将导线一端的“l”形插头插入助听器主机上的插孔。

将硬塑料接头与耳机头口紧，然后选择适当的耳塞与之相连，（即：按外道的大小选择耳塞头）

2、放入电池

将带子压在干电池下方，以方便以后取出干电池，小心吧盒盖关上