

兰冠 冷热袋 理疗冰袋 冷敷袋 热敷袋 冷热敷理疗袋 母乳保温袋

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 兰冠 冷热袋 理疗冰袋 冷敷袋 热敷袋 冷热敷理疗袋 母乳保温袋 |
| 公司名称 | 梁唯青（个体经营） |
| 价格 | 8.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:兰冠 材质:布 容量:280（ml） |
| 公司地址 | 中国 上海市宝山区 三泉路 |
| 联系电话 | 86 021 36353107 |

产品详情

| | | | |
|------|---------|----|------|
| 品牌 | 兰冠 | 材质 | 布 |
| 容量 | 280（ml） | 规格 | 280g |
| 颜色 | 蓝色 | 产地 | 中国 |
| 贸易属性 | 内贸 | | |

兰冠冷热袋冷热敷理疗 保冷保鲜必备

冷热两用-18 以下不结冰 反复使用

精品尼龙面料 直接接触皮肤 柔软舒适

冷热敷理疗 食品母乳保鲜保冷 秋冬保暖

冷敷：头痛发烧、中暑、肌肉拉伤扭伤、外伤止血

热敷：关节炎 风湿 痛经 胃疼 颈椎炎 坐骨神经痛 腰肌劳损 暖手

冷藏保鲜：母乳保鲜 啤酒饮料保冷 食品 盒饭及其他物品

【产品规格】

颜色：深蓝色

容量：280毫升（280克）

材料：高聚化合物相变蓄冷原料（卫生无毒）

重量：约290克/个（含包装）

规格：长约23cm宽约13cm

【产品介绍】

- 1.冷热袋是传统的电手炉、热敷袋、热水袋等的升级换代产品，由新颖高分子材料和稳定剂制成，科学的配方使敷袋富有弹性且在零下20 的环境中长时间存放仍能保持柔软的手感，俗称“不冻冰袋”。
- 2.通过微波炉加热和冰箱速冻，达到对人体即能热敷又能冷敷的纯物理保健效果。冬天热敷暖手、暖胃、暖腰，辅助治疗关节炎、类风湿性关节炎及体虚胃寒者；夏天冷敷消肿醒脑，发高烧物理降温，减轻疼痛等，配合冰包等保温容器可以进行食品盒饭保鲜、母乳保鲜、冰镇饮料等作用。
- 3.可长期保存，反复使用，舒适方便，是现代家庭、新妈妈、医院、敬老院、运动场及旅行者必备用品。
- 4.本品使用时可按所敷部位随意弯曲，贴近关节和肌肉，使敷疗更有效

【产品用途】

- 1.冷敷：头痛发烧、牙痛、中暑、烫伤、肌肉拉伤、扭伤、外伤止血、美容等。
- 2.热敷：关节炎、风湿、痛经、胃部不适、颈椎炎、坐骨神经痛、腰肌劳损，冬天热敷暖手、暖胃、暖腰等

3.冷藏保鲜：母乳保鲜、啤酒饮料保冷、食品、盒饭及其他物品的冷藏保鲜【使用说明】

冷敷：置于冰柜或冰箱冷冻室（-10 ——20 ）预冷30分钟以上即可使用。

热敷：将冷热袋外包一块微湿的毛巾，放入微波炉内调至中火加热，首次加热时间在60-100秒钟内，取出后感觉一下温度是否合适。如果不够热，隔10-20秒继续加热直至温度适宜。若连续使用，后续加热时间控制在在50-60秒内（中火）。

【注意事项】

1.冷热袋仅供外用,如内容物接触眼睛或皮肤,应用清水彻底清洗。

2.为防止温度过高或过低，刚开始使用时最好用毛巾或棉布包裹，如敷用后感觉不适，应先放下片刻再行敷上。如使用者循环系统有病，应先请教医生。

3.勿使本产品受到重压变形、破损，如破损请丢弃。

4.袋内物品不可食用。如不慎误食内容物,应饮下大量清水及尽量吐出，必要时应联系医生.