

家用系列 医用冰帽(大号, 成人用)发烧降温、癌症化疗冰帽

产品名称	家用系列 医用冰帽(大号, 成人用)发烧降温、癌症化疗冰帽
公司名称	桂林冰王科技发展有限公司
价格	160.00/顶
规格参数	货源类别:现货 品牌:蓝冰 材质:棉质
公司地址	中国 广西 桂林市七星区 桂林龙隐路18号
联系电话	86-07735811917 18577318589

产品详情

货源类别	现货	品牌	蓝冰
材质	棉质	产品类别	冰帽
适用性别	中性/男女均可	适用年龄段	成年
编织方法	平纹	加工方式	提花
流行元素	缝线	图案	彩格
适合季节	春季、夏季、秋季、冬季	是否外贸	否
是否库存	是		

适用于医护人员在高温中进行手术等工作。

所属类别: 医疗冷敷
产品名称: 医疗冰帽 (大号周长78cm, 成人用)
产品特性: 国内首创专利产品, 是采用最新蓄能高分子材料研制而成的高科技绿色环保型产品。在常温下蓝冰呈蓝

色柔软透明状胶体, 热容量是水的2—3倍, 具有高效蓄冷降温 (蓄热保暖) 的特殊功效, 并能反复多次

使用。操作方便安全无毒, 不流水, 不刺头, 无任何副作用。

适用于医院临床颅脑外科手术, 降低脑代谢, 减少脑部损伤, 以及高烧、高血压, 脑溢血及癌症患者

化疗等物理降温的临床应用, 是医院和家庭必备的医疗保健精品。使用方法: 1、将冰帽从包装盒中取出, 拉开冰帽上的拉链, 取出蓝冰内芯, 平放置冰箱冷冻室中冰冻2—3小时即可

使用 (不用时即可平放置冰箱冷冻室中备用) 2、使用时将蓝冰内芯从冰箱中取出依次放入冰帽外套中拉好帽沿拉链, 先将内帽戴在患者头部再戴上冰

帽, 并将皮筋适当系紧, 防止帽子滑落或冷敷部位错位。3、每次保冷3小时以上, 另备一套蓝冰内芯冰

冻后交换连续反复多次使用。

备注: 注意事项: 1、为避免交叉感染,减少医院清洗和消毒的繁琐工作,医疗上应作为患者使用的一次性冷敷用品,病愈

后可带回家作为降温防暑保健用品反复多次使用。2、对婴幼儿等不能表达自己意愿的人,要经常注意检查使用部位,防止冻伤。