

肚脐贴硅凝胶贴 穴位空贴加工

产品名称	肚脐贴硅凝胶贴 穴位空贴加工
公司名称	山东辰星医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉祥县经济技术开发区
联系电话	0537-3219990 13355172130

产品详情

基本信息

[编辑](#)

【主要结构和性能】本品是将薄荷脑、对羟基苯酸、水、高分子物质组成的高分子凝胶涂敷在无纺织基材上制成的外用贴剂组成。

【适用范围】适用于跌打肿痛的物理降温、冷敷治疗。

【使用方法】延易撕口撕开包装袋，取出贴片，揭去薄膜，将凝胶面贴在损伤部位。可根据不同损伤部位，剪成适当大小使用。每天使用1-3片，每篇可持续使用4-8小时。冷藏后使用效果更佳。

注意事项

[编辑](#)

使用前清洁使用部位并保持干燥，以增强产品粘性。

请勿贴在眼周围、粘膜、湿疹及伤口等皮肤损伤处。

若出现局部皮肤不适，请立即停止使用，严重者请医师诊治。

婴幼儿及孩童应在成人的监护下使用，防止误用误食。

本品为外用贴剂，为保持粘性，请勿重复使用。

开封后应尽快使用，以防止产品粘性降低

