

爱谨生物 牛结核杆菌抗体检测试纸卡

产品名称	爱谨生物 牛结核杆菌抗体检测试纸卡
公司名称	杭州爱谨生物科技有限公司
价格	400.00/盒
规格参数	货号:AJB213 检测样本:牛血清、血浆 存储条件:2-30摄氏度
公司地址	浙江省杭州市钱塘区白杨街道20号大街578号1幢1楼(注册地址)
联系电话	13588116846

产品详情

【产品名称】

通用名：牛结核杆菌抗体检测试纸卡

商品名：无

英文名：Bovine Tuberculosis Antibody Rapid Test

汉语拼音：Niu Jie He Gan Jun Kang Ti Jian Ce Shi Zhi Ka

【主要成分与含量】

组分	数量	规格
牛结核杆菌抗体检测试纸卡、干燥剂	20袋	1份/袋
样品缓冲液	1瓶	4.0mL/瓶
10 μL毛细滴管	1袋	20个/袋
说明书	1份	/

【作用与用途】用于检测牛血清或血浆样本中的牛结核杆菌抗体。

【使用样本】血清、血浆。

【用法与判定】

1用法

1.1 样本处理

1.1.1 血清：在室温下血液自然凝固10-20分钟后，收集析出的上清液即为待检样本。

1.1.2 血浆：采集全血样本加入抗凝管，离心10分钟（3000转/分），收集上清液即为待检样本。

1.2 操作步骤

（1）从包装袋中取出试纸卡，使样品孔（S）和检测窗口朝上，放置于水平台面。

（2）用10 μ L 毛细滴管吸取待检样本，使滴管竖直，滴加1滴（约10 μ L）到样品孔“S”中，再逐滴滴加3滴样品缓冲液（约120 μ L），并开始计时。

（3）静置，5~10分钟后观察结果。

注意：跑板过程中不可手动拿起检测试纸卡，否则可能导致跑板失败。

2 判定

（1）在试纸卡检测窗口可观察到两条红色条带（T：检测线，C：质控线），无论线条深浅，皆判为阳性（。

（2）在试纸卡检测窗口仅观察到一条红色条带（C：质控线），则判为阴性。

（3）在试纸卡检测窗口质控线（C）处不出现红色条带，无论是否有检测线（T）出现，皆判为无效结果。

对于无效结果，建议重复一次检测过程；若重复检测结果仍为无效，请联系当地经销商或我司及时反馈，以及时获取技术指导。

牛结核杆菌抗体检测试纸卡结果判定示意图

【注意事项】

（1）包装破损、过有效期的，请勿使用。

（2）试纸卡贮藏与运输过程中不可冷冻，避免阳光直晒。

（3）撕开铝箔袋取出检测试纸卡后应立即使用，防止试纸卡受潮。

（4）请勿混用不同批次的样品缓冲液，且试纸卡为一次性消耗品，不可重复使用。

（5）使用过的试纸卡及检测样品等应视同污染物，应根据相关法规要求妥善处理。

【规格】 20头份/盒

【贮藏与有效期】 2~30 阴凉干燥处保存，有效期为18个月。

【生产企业】 杭州爱谨生物科技有限公司

浙江省杭州市钱塘区白杨街道20号大街578号1幢1楼

仅供兽医临床诊断使用