

爱谨生物 牛传染性鼻气管炎抗体检测试纸卡

产品名称	爱谨生物 牛传染性鼻气管炎抗体检测试纸卡
公司名称	杭州爱谨生物科技有限公司
价格	500.00/盒
规格参数	品牌:爱谨 保质期:18个月 检测原理:免疫层析技术
公司地址	浙江省杭州市钱塘区白杨街道20号大街578号1幢1楼(注册地址)
联系电话	13588116846

产品详情

【兽药名称】牛传染性鼻气管炎病毒抗体检测试纸卡

【主要成分与含量】

组分	数量	规格
牛病毒性腹泻病毒抗体检测试纸卡、 40 μ L滴管、干燥剂	20袋	1份/袋
样品缓冲液	1瓶	4.0mL/瓶
说明书	1份	/

【作用与用途】用于检测牛血清或血浆样本中的牛传染性鼻气管炎病毒抗体。

【使用样本】血清，血浆。

【用法与判定】

1用法

1.1样本处理

1.1.1血清：在室温下血液自然凝固10-20分钟后，收集析出的上清液即为待检样本。

1.1.2血浆：采集全血样本加入抗凝管，离心10分钟（3000转/分），收集上清液即为待检样本。

1.2操作步骤

(1) 从包装袋中取出试纸条，使样品孔(S)和检测窗口朝上，放置于水平台面。

(2) 用40 μL滴管吸取待检样本，使滴管竖直，滴加1滴(约40 μL)到加样孔“S”中，再逐滴滴加2滴样品缓冲液(约80 μL)，并开始计时。

(3) 静置，5~10分钟后观察结果。

注意：跑板过程中不可手动拿起检测试纸卡，否则可能导致跑板失败。

2 判定

(1) 在试纸卡检测窗口可观察到两条红色条带(T：检测线，C：质控线)，无论线条深浅，皆判为阳性。

(2) 在试纸卡检测窗口仅观察到一条红色条带(C：质控线)，则判为阴性。

(3) 在试纸卡检测窗口质控线(C)处不出现红色条带，无论是否有检测线(T)出现，皆判为无效结果。对于无效结果，建议重复一次检测过程；若重复检测结果仍为无效，请联系当地经销商或我司及时反馈，以及时获取技术指导。

【注意事项】

(1) 包装破损、过有效期的，请勿使用。

(2) 试纸卡贮藏与运输过程中不可冷冻，避免阳光直晒。

(3) 撕开铝箔袋取出检测试纸卡后应立即使用，防止试纸卡受潮。

(4) 试纸卡为一次性消耗品，不可重复使用。

(5) 使用过的试纸卡及检测样品等应视同污染物，应根据相关法规要求妥善处理。

【规格】 20头份/盒

【贮藏与有效期】 2~30 阴凉干燥处保存，有效期为18个月。

【生产企业】 杭州爱谨生物科技有限公司

浙江省杭州市钱塘区白杨街道20号大街578号1幢1楼