

爱谨生物 牛口蹄疫3ABC抗体检测试纸卡

产品名称	爱谨生物 牛口蹄疫3ABC抗体检测试纸卡
公司名称	杭州爱谨生物科技有限公司
价格	400.00/盒
规格参数	货号:AJB203 检测样本:牛血清、血浆 存储条件:2-30摄氏度
公司地址	浙江省杭州市钱塘区白杨街道20号大街578号1幢1楼（注册地址）
联系电话	13588116846

产品详情

【产品名称】

通用名：牛口蹄疫病毒3ABC抗体检测试纸卡

英文名：Bovine Foot and Mouth Diseases Virus Non-Structural Protein Antibody Rapid Test

【主要成分与含量】

组分	数量	规格
牛口蹄疫病毒3ABC抗体检测试纸卡、 40 μ L滴管、干燥剂	20袋	1份/袋
说明书	1份	/

【作用与用途】 用于检测牛血清或血浆样本中的牛口蹄疫病毒3ABC抗体。

【使用样本】 血清、血浆。

【用法与判定】

1用法

1.1样本处理

1.1.1血清：在室温下血液自然凝固10-20分钟后，收集析出的上清液即为待检样本。

1.1.2血浆：采集全血样本加入抗凝管，离心10分钟（3000转/分），收集上清液即为待检样本。

1.2操作步骤

操作步骤示意图

（1）从包装袋中取出试纸卡，使样品孔（S）和检测窗口朝上，放置于水平台面。

（2）用40 μL滴管吸取待检样本，使滴管竖直，在样品孔“S”中逐滴滴加3滴（约120 μL），并开始计时。

（3）静置，5~10分钟后观察结果。

注意：跑板过程中不可手动拿起检测试纸卡，否则可能导致跑板失败。

2 判定

牛口蹄疫病毒3ABC抗体检测试纸卡结果判定示意图

【注意事项】

（1）包装破损、过有效期的，请勿使用。

（2）试纸卡贮藏与运输过程中不可冷冻，避免阳光直晒。

（3）撕开铝箔袋取出检测试纸卡后应立即使用，防止试纸卡受潮。

（4）试纸卡为一次性消耗品，不可重复使用。

（5）使用过的试纸卡及检测样品等应视同污染物，应根据相关法规要求妥善处理。

【规格】 20头份/盒

【贮藏与有效期】 2~30 阴凉干燥处保存，有效期为18个月。

【生产企业】 杭州爱谨生物科技有限公司

浙江省杭州市钱塘区白杨街道20号大街578号1幢1楼

仅供兽医临床诊断使用