

爱谨生物 猪口蹄疫O型抗体检测试纸卡 AJB115

产品名称	爱谨生物 猪口蹄疫O型抗体检测试纸卡 AJB115
公司名称	杭州爱谨生物科技有限公司
价格	200.00/盒
规格参数	品牌:爱谨 规格:20T/盒 产地:杭州
公司地址	浙江省杭州市钱塘区白杨街道20号大街578号1幢1楼(注册地址)
联系电话	13588116846

产品详情

【产品名称】通用名：猪口蹄疫病毒O型抗体检测试纸卡

【主要成分与含量】

组分	数量	规格
猪口蹄疫病毒O型抗体检测试纸卡	20袋	1份/袋
40 μL滴管、干燥剂		
说明书	1份	/

【作用与用途】用于检测猪血清或血浆样本中的猪口蹄疫病毒O型抗体。

【使用样本】血清、血浆。

【用法与判定】

1用法

1.1样本处理

1.1.1血清：在室温下血液自然凝固10-20分钟后，收集析出的上清液即为待检样本。

1.1.2血浆：采集全血样本加入抗凝管，离心10分钟（3000转/分），收集上清液即为待检样本。

1.2操作步骤

(1) 从包装袋中取出试纸卡，使样品孔(S)和检测窗口朝上，放置于水平台面。

(2) 用40 μL滴管吸取待检样本，使滴管竖直，在样品孔“S”中逐滴滴加2滴(约80 μL)，并开始计时。

(3) 静置，5~10分钟后观察结果。

注意：跑板过程中不可手动拿起检测试纸卡，否则可能导致跑板失败。

2 判定

(1) 在试纸卡检测窗口可观察到两条红色条带(T：检测线，C：质控线)，无论线条深浅，皆判为阳性(见图2，A)。

(2) 在试纸卡检测窗口仅观察到一条红色条带(C：质控线)，则判为阴性(见图2，B)。

(3) 在试纸卡检测窗口质控线(C)处不出现红色条带，无论是否有检测线(T)出现，皆判为无效结果(见图2，C)。对于无效结果，建议重复一次检测过程；若重复检测结果仍为无效，请联系当地经销商或我司及时反馈，以及及时获取技术指导。

【规格】 20头份/盒

【贮藏与有效期】 2~30 阴凉干燥处保存，有效期为18个月。

【生产企业】 杭州爱谨生物科技有限公司

浙江省杭州市钱塘区白杨街道20号大街578号1幢1楼