

甘露醇加温箱/溶解甘露醇恒温箱/药品加热箱

产品名称	甘露醇加温箱/溶解甘露醇恒温箱/药品加热箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

甘露醇加温箱/溶解甘露醇恒温箱/药品加热箱用途：甘露醇是临床上普遍用于治疗颅脑疾病、脱水、降低颅内高压的药品.护理管理中规定,抢救车内的甘露醇,必须无结晶完好备用,每班交接并记录.临床发现甘露醇经过一段时间,均会出现不同程度的结晶,尤其在天气寒冷的季节更容易结晶.传统的解决办法是用热水化开结晶,不但影响患者抢救和治疗,还无形中增加了护士的工作量.福意联甘露醇恒温箱,作为新型溶解甘露醇结晶设备,37~42度的环境里进行溶解,或25~27度的环境下保温,优良大方便解决甘露醇结晶溶解问题,已经在各大医院广泛使用.甘露醇加温箱/溶解甘露醇恒温箱/药品加热箱使用方法：1、先确认甘露醇恒温箱工作状态正常,机器使用及外部供电正常稳定.2、确认甘露醇结晶程度,如果甘露醇结晶比较严重,已形成絮状结晶或块状,需要42度以上温度经行溶解,等完全溶解后把温度调为37度恒温保存;如果甘露醇没有结晶现象,只需要37度恒温保存,防止结晶及使用.3、根据箱体大小放入相应的甘露醇瓶数量,摆放不应太过密集,确保恒温箱箱体内空气正常流通.特别说明：放入之前应确保甘露醇瓶完好不破裂现象.4、使用者应根据甘露醇用量和甘露醇结晶情况来合理安排放入甘露的数量和时间。建议：提前放入,随用随取,随取随加。甘露醇加温箱/溶解恒温箱/加热箱参数：-----

-----产品型号 容积大小 温度范围
 外型尺寸-----型号:FYL-YS-150L 150L
 温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48
 外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48
 外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48
 外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm--
 -----型号:FYL-YS-828L 828L
 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48 外型尺寸:1
 267*680*2105mm -----型号:FYL-YS-151L
 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0~100
 外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100
 外型尺寸:595*675*1795mm-----

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、 温感探头，自动显示箱体内部温度，

便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优质钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

甘露醇加温箱/溶解恒温箱/加热箱行业相关相关：甘露醇注射液，适应症为1.组织脱水药。用于治疗各种原因引起的脑水肿，降低颅内压，防止脑疝。2.降低眼内压。可有效降低眼内压，应用于其他降眼内压药无效时或眼内手术前准备。3.渗透性利尿药。用于鉴别肾前性因素或急性肾功能衰竭引起的少尿。亦可应用于预防各种原因引起的急性肾小管坏死。4.作为辅助性利尿措施治疗肾病综合征、肝硬化腹水，尤其是当伴有低蛋白血症时。5.对某些药物过量或毒物中毒（如巴比妥类药物、锂、水杨酸盐和溴化物等），本药可促进上述物质的排泄，并防止肾毒性。6.作为冲洗剂，应用于经尿道内作前列腺切除术。7.术前肠道准备。