

医用恒温箱加温液体手术室FYL-YS-230L

产品名称	医用恒温箱加温液体手术室FYL-YS-230L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	67238.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用恒温箱加温液体手术室FYL-YS-230L公司说明-

公司在飞速发展的同时，福意联形成“质量立业，客户至上”的经营理念。对推出的每一款产品，都本着对客户负责的原则，重合同、守信用，在各地建立网络式的维修网点，销售到什么地方，服务也跟进到什么地方。随时随地、全心全意地为所有用户提供优质的售后服务，确保每一位用户无后顾之忧！

医用恒温箱加温液体手术室FYL-YS-230L用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

医用恒温箱加温液体手术室FYL-YS-230L产品参数：

1、首先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用恒温箱加温液体手术室FYL-YS-230L行业相关-低体温处理方法

低温定义：核心温度低于35℃。我们普通的标准温度计是无法测量的。在低温的情况下，电子血压计读数也不准确。需要用低刻度的直肠温度计，至少放入直肠15厘米。实际上，在现场大部分院

前急救系统不测量体温。 广义定义：当核心温度降低，令受害者无法产生足够的热量，恢复体内平衡或正常的生理机能，便可视作低温。 低温病因：寒冷的空气、冷水沉浸、冷水淹没、严重外伤、手术麻醉等。 医用恒温箱加温液体手术室FYL-YS-230L