

# 理疗电极片 大鲸一次性

产品名称	理疗电极片 大鲸一次性
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	16.00/袋
规格参数	品牌:大鲸 型号:DJ-VII 产地:郑州
公司地址	郑州郑东新区CBD建业总部港C座10层
联系电话	18037270222 18037270222

## 产品详情

### 详细资料

理疗电极片操作方法：1、外敷，使用前清洗患部擦拭。2、撕掉铝箔包装袋，将针灸理疗用电量级片各自嵌入在正负极电极板上；针灸理疗用电量级片紧贴在肌肤有关位置，用纱布（或贴敷疗法，沙包等）将电极板固定不动，卡紧。3、针灸理疗完毕，切断电源后，松掉电极板，取下针灸理疗用电量级片，用水或盐水清理与理疗电极片触碰的肌肤有关位置。理疗电极片常见问题：1、针灸理疗用电量级片务必与肌肤彻底密切触碰2、使用前先清洁皮肤，使用时有凉爽感，此时需要留意理疗机的伤害抗压强度，微有电刺激就可以3、使用时如觉得刺激性过强，如皮肤出现明显刺疼或烧灼感，务必减少理疗机的硬度或环境温度4、针灸理疗用电量级片包装破损，电极贴片变干时，不适合应用，以防导致烧灼5、本产品为一次性使用商品，不可以多次重复使用，避免导致由于电极片电阻器等理化性质更改，导致烧灼或互相污染融入病症：康复医学科：风湿病、劲椎病、腰椎盘突出、坐骨神经疼、落枕了、皮下组织扭挫伤、肌肉酸疼、快速消肿。消化内科：急慢性胃炎、肠胃病、肠梗堵、盲肠炎、直肠炎、拉肚子、肚胀、严重便秘、消化不好等