

理疗用体表电极 使用介绍

产品名称	理疗用体表电极 使用介绍
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	8.00/袋
规格参数	品牌:大鲸 型号:DJ-I 产地:郑州
公司地址	郑州郑东新区CBD建业总部港C座10层
联系电话	18037270222 18037270222

产品详情

定制贴片 oem 理疗电极片 批发零售 发货快 一次性理疗用体表电极片

理疗用体表电极片常规型使用方法：

外用，使用前洗净擦干；

撕开铝箔袋，将理疗电极片分别镶嵌在正负电极板上；理疗电极片紧贴在皮肤相关部位，用绷带（或敷贴，沙袋等）将电极板固定，压紧；

理疗结束，切断电源后，松开电极板，取出理疗电极片，用清水或生理盐水清洗与理疗极片接触的皮肤相关部位

规格2贴/袋，分别贴于相关部位

一次性理疗体表电极片注意事项1、本品为一次性使用；2、本品应在医生指导下使用；3、使用中若有不适或偶有皮肤表皮发红，应暂停使用；4、皮肤受损、大面积溃破者禁用；