

外贸工厂OEM电子体温计

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 外贸工厂OEM电子体温计 |
| 公司名称 | 浙江东阳市亿思特电子有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:亿思特 型号:ETJ电子体温计 产地:东阳 |
| 公司地址 | 浙江省东阳市白云街道东针路55号 |
| 联系电话 | 13806773622 |

产品详情

| | | | |
|------|------|------|----------|
| 品牌 | 亿思特 | 型号 | ETJ电子体温计 |
| 产地 | 东阳 | 箱装数量 | 360PC/箱 |
| 贸易属性 | 外贸原单 | | |

性能特点:1、专业品质
精确测量2、安全、易读、快速、准确3、小巧轻便，携带方便4、lcd数字液晶显示，清晰易读

规格说明：1、温度范围：32.0-42.0。

2、测量时间约60秒，即可量出体温，并自动发出哔哔声告知，使用非常方便3、附有发烧提示音及最后一次测温记忆4、可采用口腔、腋下、肛门三种部位进行量测5、温度精度:±0.1 6、重量:约10克

测量时的注意事项：

人体腋下温度较不稳定，易受环境温度及测量方式影响，因此需要紧闭腋窝3分钟以上才能达到体温的实际温度，本电子体温计测量时间非常快速，只需约1分钟即可量出温度，因此在做腋窝测量时，测量前手臂自然下垂，将腋窝紧闭3分钟，使腋窝温度稳定，再将体温计的感温体部分置入腋窝中央将腋窝紧闭一分钟，待听到哔哔声即腋窝温度测量完成，若未将腋窝紧闭3分钟，而直接测量，则人体实际温度在腋窝尚未稳定，而体温计在1分钟内所测温度较人体实际温度低，所以再测量值上要约多加0.3-0.6摄氏度。测量口腔温度是比较稳定的，测温前将双唇闭上约1分钟，不可饮食（热食物会是口腔温度过高），是口内温度平稳，将量温棒的感温体部分置于舌下二侧之热包部分，并用舌头压紧感温棒，紧闭约1分钟，听到哔哔声，即表示测温完成。体温计测量建议使用口腔量为佳，人体的正常体温在36-37度之间。

包装：每支一透明盒一开窗彩盒包装，36pcs每中盒，360pcs一外箱。