

大鲸超声药物透入治疗仪 离子导入仪

产品名称	大鲸超声药物透入治疗仪 离子导入仪
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:大鲸 型号:MC-TD-01 产地:河南
公司地址	郑州郑东新区CBD建业总部港C座10层
联系电话	18037270222 18037270222

产品详情

大鲸超声药物透入治疗仪 离子导入仪 甲类医保、新农合报销

超声导入治疗的治疗范围，不仅取决于透入的药物和透入的部位（在这里超声导入治疗作用类似与注射器，治疗范围取决于药物），还具有温热理疗功能。临床实验证明效果明确，治疗范围大。

适用于：中医科、康复疼痛科，儿科、骨科等

1. 本仪器所用电源应是带地线的三芯插座，并接好外接地线。
2. 启动电源开关后再放电极板，摘掉极板后再关电源开关。
3. 关于治疗剂量的大小应因人而异，不能一味追求大电流。应以感觉舒适为宜。对皮肤感觉灵敏度差的患者更应注意防止烫伤。选择治疗剂量大小的原则是：小剂量对人体起兴奋作用，大剂量对人体起抑制作用，应根据病情需要选择适当剂量。
4. 治疗时，必须用浸湿浸透的大厚棉垫，且大棉垫厚面下边是涂有药液的小药垫，小药垫下边是皮肤患处，否则易引起烧、烫伤皮肤。注：棉垫均应抻平，并与皮肤接实。
5. 医生应告诉患者在使用遥控器时若身体感到不适，应立即按住减键，此时输出剂量会逐渐递减至零，然后由医生酌情处理。
6. 医生在治疗过程中若发现某路患者有不适感或其它紧急情况均应立即按动该路复位键即可以使该路输出立即回零。
7. 患者使用过的小药垫、大棉垫应及时煮沸清洗消毒，防止交叉感染。

8. 应用本仪器进行药物导入时，所导入药物应在医生指导下进行。对人体导入有关过敏性反应的药物(例如：青霉素等)应对患者进行皮试试验后适应者方可进行。
9. 心脏及心脏的投影部位、太阳穴、孕妇的下腹部、伤口及出血部位均不得作为治疗部位。
10. 对严重心脏病及装有心脏起搏器、感染性炎症、破伤风、恶液质、有出血倾向、精神病患者及对直流电不能耐受者，均应禁止使用本仪器进行治疗