

胃肠双动力治疗仪 大鲸胃肠联合作用仪器 多部位使用

产品名称	胃肠双动力治疗仪 大鲸胃肠联合作用仪器 多部位使用
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:大鲸 型号:DJ-R5 厂家:郑州大鲸医疗科技有限公司
公司地址	郑州郑东新区CBD建业总部港C座10层
联系电话	18037270222 18037270222

产品详情

胃动力不足导致习惯性便秘是老年人高发病症，严重影响其营养吸收，脑卒中患者以及长期卧床患者导致肠蠕动缓慢从而使肠排空延迟产生便秘。功能性胃肠病治疗仪通过外源性电刺激调控胃肠电活动，以控制胃肠运动功能，从而达到恢复或改变胃肠功能活动，消除或减轻症状的目的。

肠胃双动力治疗仪，是对于专一治疗胃或者肠的突破，一次性同时作用于肠胃起搏点的四个部位，根据不同的人，同时治疗胃肠道疾病，优势明显。

起搏点定位

一副治疗电极有4片自粘胶片，分别贴于肠/胃起搏点

(1. 体表胃起搏点的定位，一片电极贴于胃窦部位在体表的投影出，即剑突与及连线的中间点向右旁开2至5厘米，另一片电极贴于胃体部位在体表的投影出，即剑突与脐连线的中点向左旁开3至5厘米往上1厘米处。

(2. 体表肠起搏点的定位：一片电极贴于脐上1至2厘米处。另一片电极贴于剑突与脐连线的中点向右旁开5至10厘米处。

胃肠双动力治疗仪，主要使用范围包括如下：

康复理疗科、中医科 脑中风引起的偏瘫、半身不遂，肢体功能受限，因为不活动引起的消化不良，肠蠕动差，便秘的情况很多

手术外科、妇产科、骨科 做完手术后术后恢复、术后排气、术后消炎，防止肠粘连、梗阻，促进伤口愈合。

肿瘤科 有效改善放化疗患者消化道黏膜受损引起的恶心、呕吐症状，和放化疗患者机体功能下降、镇痛药物不良反应引起的梗阻、便秘等症状)

老年科：老年人机体功能下降扩约肌收缩不好引起的便秘、排便困难、胃肠蠕动能力差、各种消化不良等症状。

在使用大鲸胃肠双动力治疗仪时，需要注意的几点：

台式为双通，可以同时治疗两个人，八部位。

体内含有金属物的，不可使用此设备

孕妇禁止使用