

中医定向透药治疗仪参数 发展历程

产品名称	中医定向透药治疗仪参数 发展历程
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	88000.00/台
规格参数	品牌:大鲸 型号:DJ-A8 产地:河南
公司地址	郑州郑东新区CBD建业总部港C座10层
联系电话	18037270222 18037270222

产品详情

众所周知，随着西医的发展，中医渐进的变的无人问津，为何，因为见效快，工作压力大，生活节奏快，谁还会为了治个感冒发烧，腰腿疼退吃中药，一连几个星期都不见好转，所以中医比不过西医，但是现在有了定向透药治疗仪，我们把中药浓缩到药片里，然后再利用中医透药治疗仪的经皮给药，靶向透药的特定，把中药的精华部分直接输送到病灶部位，使中医见效慢的缺点荡然无存，效果好，见效快，中医何以发展不起来呢？大鲸透药治疗仪标志着中医看病的潮流，发展我们的中医文化。

六重功效：

电热敷效果应 促进组织中渗出物的吸收与消散，加速对药气粒子的吸收。

远红外效应 消炎、消肿、解痉、祛风、驱湿、舒经散寒、疏血化瘀。

交变磁场效应 磁疗能量起到消炎、消肿、降压、止泻、镇痛及化瘀等作用。

穴位刺激经络 疏通经络、调整气血、平衡阴阳、增强免疫力。

微量元素补充 导磁磁芯富含多种人体必需的量元素，达到补充效应。

中药粒子导入 内病外治、透皮给药、透皮吸收、恢复人体机能

中医定向透药治疗仪原理

药物导入：热疗带或皮肤发热电极板(片)面加上对病症有针对性治疗的药水，贴敷在病灶部位，通电治疗，有药物导入功能。具有明显降低人体阻抗，在强脉冲频率、电场效应的作用下，把中药药液分解成药离子，再通过仪器的功能：无针针灸、红外线和热疗等作用，增强了生物膜渗透性，将大剂量的药离子渗透到人体较深的病灶部位，有效地促进血液循环，有即刻止痛的功效。

适应症：

颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出、腰肌劳损、骨质增生、风湿性关节炎、类风湿腰腿痛、网球肘炎、手脚麻木、肌纤维组织炎、软组织挫伤、腱鞘炎、中风后遗症、前列腺炎、妇科病等多种常见病；恢复骨病正常生理结构（曲度），达到复位的作用，改变骨病失稳，缓解或消除骨质增生；消除水肿、炎症、改善脑供血不足；解除压迫神经造成的疼痛；全方位调整骨病周围组织机能，消除病症。

· 操作须知

治疗前用湿毛巾或稀释的酒精抹净患部，根据患者病情选用不同的贴片；因人体病变部位神经敏感度降低，或不同部位的感觉不同，则会出现一块电极刺激强，一块电极刺激弱的现象，属正常现象，必要时可变更穴位，或对调两块电极片位置即可。

- 靠近短波或者微波治疗设备使用可能引起输出不稳定。
- 使用操作该仪器人员必须是医疗机构的知制定技术人员。
- 使用工作人员必须经过培训或认真阅读说明书操作者。
- 不得使用规格不当的贴片，接触不良，可能产生危害。
- 仪器操作治疗耗材贴片为一次性耗材，不得重复使用。
- 必须用绑带固定，否则可能导致接触面不良发生损害。
- 同部位反复使用可能引起皮肤过敏反应，应尽量避免。

主要参数配置

主机(台) 1

吸水透热电极板(付) 1

自粘电极(赠品)(付) 1

弹性绷带(条) 2

注意事项

1. 本仪器所用电源应是带地线的三芯插座，并接好外接地线。
2. 启动电源开关后再放电极板，摘掉极板后再关电源开关。
3. 关于治疗剂量的大小应因人而异，不能一味追求大电流。选择治疗剂量大小的原则是：小剂量对人体起兴奋作用，大剂量对人体起抑制作用，应根据病情需要选择适当剂量。