

生理盐水加温箱60-80 医用恒温箱

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 生理盐水加温箱60-80 医用恒温箱 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 76114.00/台 |
| 规格参数 | 介绍:福意联医用恒温箱 温度:0-100 容积:150-430-1028升 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849 |

产品详情

生理盐水加温箱60-80 医用恒温箱公司说明-

北京福意电器有限公司在飞速发展的同时，逐步形成了“售后至上”的经营理念。展望未来，福意联人充满信心，必将做出更杰出的成果回报广大客户。主要产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等等。我们热诚外广大客户来人来函洽谈。很荣幸为你提供优良、的售后。

生理盐水加温箱60-80 医用恒温箱用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

生理盐水加温箱60-80 医用恒温箱产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

生理盐水加温箱60-80 医用恒温箱相关-

预防低体温的保温护理措施 1.

加强病人温度监测:对手术病人常规监测体表温度，维持体温在36 以上。 2 . 保暖：接送患者术前任何时候都不要暴露患者，尽可能避免通过寒冷的过道。患者在进出手术室的途中，应给予足够的包裹，使之与周围的冷空气隔离。 3 . 规范手术室的温度：手术室温度太高，会增加细菌繁殖，造成手术创口污染，手术室温度保持在22 —25 ，相对湿度40% ~ 60%为宜，新生儿及早产儿手术室将室温保持在27—29 。

4 . 术中在非手术区域的四肢和躯干用棉被、肩垫、手臂保暖棉垫等覆盖以减少散热。

5. 新生儿辐射保温台：辐射台温度调至 28

，将剖腹产出生的新生儿用小被子包好，放在辐射台上，为其保温。 6. 液体加温对输入体内的液体和血液制品加温至37 ，可以预防低体温的发生生理盐水加温箱60-80

医用恒温箱