

手术室用电加热箱60-80 容积200-400升

产品名称	手术室用电加热箱60-80 容积200-400升
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	73780.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

手术室用电加热箱60-80 容积200-400升公司说明-

北京福意电器有限公司重视科学管理，引入现代企业管理理念，迈着稳健的步伐在现代化企业的经营轨道上前进。精益求精的产量与尽善尽售后为我们赢得了每一位客户的赞誉。我们坚持贯彻体系，严格把关产量，确保代理商和用户后顾之忧。公司业经营医疗恒温箱、干燥柜、医用冰箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等系列产品。

手术室用电加热箱60-80 容积200-400升用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

手术室用电加热箱60-80 容积200-400升产品参数：

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。
- 3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。
- 4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

手术室用电加热箱60-80 容积200-400升相关-

手术患者术中体温变化,总结保持术中低体温的护理经验.方法 将78例手术患者随机分为观察组和对照组,每组39例,观察组将术中输注液体和冲洗液体加温至37℃;对照组液体不采用加温措施.观察术中体温变化幅度、术中不良反应.结果 观察组术中体温变化幅度明显小于对照组,差异有统计学意义($P < 0.05$);两组在术中均未出现明显不良反应,差异统计学意义($P > 0.05$).结论 采取加温术中液体的方式可保持手术患者术中体温的平稳,安全,为成功完成手术提供了有力保障.手术室用电加热箱60-80 容积200-400升