

# 实用的减肥仪器

产品名称	实用的减肥仪器
公司名称	卓然科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市西大街138号银座国际
联系电话	0371-60396239 13393727988

## 产品详情

最实用的减肥仪器产品型号：ZR-J0101 一、工作原理和功能：最实用的减肥仪器主要是仿真中医针灸调节经络的原理，达到了对器官内分泌的调节，促进对脂肪的分解，从而使脂肪细胞体积变小，达到减肥塑身美体、收紧皮肤的目的。最实用的减肥仪器功能：减肥、塑身、美体、丰胸、提臀、瘦脸、美容、去斑、理疗、排毒、卵巢保养、调节内分泌、祛皱、肾保养等。效果：减肥10天为一个疗程，一个疗程减4—30斤，最实用的减肥仪器瘦腰4—18公分，丰胸20天为一个疗程，一个疗程可增大提升2—10公分。二、仪器特点：本仪器是由计算机芯片控制，设置精确操作方便，最实用的减肥仪器波形丰富，是电子技术与现代减肥理念的完美结合。此减肥仪器分为左右两路。每路含1组腹部输出，2组局部输出，各路之间相互独立，可单独调节，腹部输出有9个处方，局部输出，有6个处方，可供选择，处方针对性强，适用于不同部位，效果更好。三、注意事项：（1）工作前首先打开电源开关；（2）最实用的减肥仪器作用于人体时，除面部不用湿纱布其它任何一个部位都必须放湿纱布。（纱布以不滴水为标准）（3）腹包在作用于人体时，严禁倒置，腹包上的三角形方向对准头部。中间的一颗电极豆对准神阙穴（俗称肚脐）（4）使用局部时，在同一个局部工作区内不能同时做两个不相同的局部（因为人体不同部位的耐受力不一样。腹部之外，其它任何一个部位都称之为局部。）（5）当机器发出提示音时或需要终止工作时必须按动停止键，在工作时，如果需要取下腹包或电极片必须按停止键。

（6）最实用的减肥仪器在机器工作时，两个电极片内侧严禁接触在一起。四、注意不宜做仪器的人：（1）传染、皮肤、出血性疾病。（2）严重的心脏、肺肝肾等疾病。（3）酒后神志不清；精神不正常。（4）年老体弱、极度衰弱的人。（5）孕妇、妇女月经期。（6）体内有钢钉者。（7）手术后一年之内。

最实用的减肥仪器禁忌症：1、高血压、心脏病、孕妇、局部皮肤破损者，严重器质性病变者禁用。

2、月经期及前后3天、更年期、内分泌异常、酒后效果不佳。注意事项：

- 1、不要频繁拉伸折迭电极导线，不要带电插、拔电极导线。
- 2、同一输出因个人承受强度不同，不允许两人同时使用。
- 3、不要过快加大输出强度，应根据患者实际承受能力调节输出强度。
- 4、治疗完毕后应用医用酒精将电极擦拭消毒，以备下次使用。
- 5、最实用的减肥仪器使用中电极片内不要相接触，以免发生短路
- 6、治疗前及治疗后2小时内不要进食。7、少食高热、高脂食物，尤其避免晚间进食。

五、最实用的减肥仪器技术参数：输出功率 20W

电源频率 50HZ—60HZ 操作接口 按键式数码 电压

100V—240V 机器尺寸 101×45×42(cm) 外包装尺寸 109×54×42(cm) 外包装

木箱

厂家销售电话：13393727988（葛经理），网址：[www.jianfeiyiqi.com](http://www.jianfeiyiqi.com) 重量 30公斤