

百草岭医疗 脑循环功能障碍治疗仪 操作介绍

产品名称	百草岭医疗 脑循环功能障碍治疗仪 操作介绍
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	品牌:大鲸 型号:ZL-N-800 产地:河南
公司地址	郑州郑东新区CBD建业总部港C座10层
联系电话	18037270222 18037270222

产品详情

百草岭医疗 脑循环功能障碍治疗仪 操作介绍 经颅磁刺激仪使用方法：

- (1)将经颅磁放置在一个平整的位置，便于操作。
- (2)将治疗帽输出线插入磁疗输出插口，再将电源线插入电源插座。
- (3)开启电源开关键，仪器呈呈待机状态，显示屏亮。
- (4)按下经颅磁“启动\停止键”，设备开始工作，经颅磁指示灯亮，时间即可开始倒转。
- (5)调整仪器工作时间为20分钟，调整经颅磁强度为一档。
- (6)按下“复位”键设备停止工作，恢复到开机状态

分为三个档次：

01档(低档)：3MT-5MT(第1-10天使用)

02档(中档)：6MT-9MT(第11-30天使用)

03档(gao档)：10MT-18MT(第30天之后症状严重者使用)

操作简单 根据不同的症状可以 选择不同的参数