

妇之宝暖宫贴 痛经贴，月经不调暖宫宝 暖宫片

产品名称	妇之宝暖宫贴 痛经贴，月经不调暖宫宝 暖宫片
公司名称	广州市千秋化妆品有限公司
价格	8.00/件
规格参数	产品类别:保暖贴 品牌:妇之宝暖宫贴 货号:6924845781211
公司地址	中国 广东 广州市白云区 广州市白云区机场路138号
联系电话	086 020 15360504522 13424058054

产品详情

产品类别	保暖贴	品牌	妇之宝暖宫贴
货号	6924845781211		

妇之宝暖宫贴,女性痛经,月经不调,宫寒,胃寒,卵巢保养,预防妇科病,调气血,营阴阳,舒筋活络,火山能量石成份,长达16小时平均51度的贴身呵护!

本产品为片状贴剂,火山能量石成份及多种微量元素。采用真空包装,贴于肚脐下三分“气海穴”的内裤外侧即可,开封后火山能量石被空气激活,5分钟开始发热,15分钟可缓解疼痛,能够连续16小时不间断释放能量,通过对气海穴的温热烫灸,并运用红外线进行理疗,给予女性平均51 的贴身呵护。来源地球深处的火山能量石与多种纯天然植物精华精心配制而成,蕴涵无限温暖!

适用范围:痛经、月经不调、宫寒及风寒痹症、卵巢保养、防止更年期忧郁症、各种产后疼痛及后遗症、淡化妊娠纹及黄褐斑、局部肥胖、预防妇科病,延缓更年期。

作用原理及特点1、独创性及先进性:“妇之宝”暖宫贴是现代生物学,中医内治学说与现代新材料科学的巧妙结合,充分发挥物理温热和红外线理疗的协同作用,是妇科病治疗史上的一场重大改革和创新,具有划时代意义,更为产后病,痛经、月经不调、宫寒的发展提供了新的思路和方法。

2、高效性及速效性:5分钟开始发热,15分钟可缓解疼痛。3、安全性及绿色环保概念:产品立意严谨,组方科学,工艺先进,疗效独特,产品质量稳定,不接触皮肤,不污损衣服,不污染环境,没有任何副作用

主要功能 痛经、月经失调、宫寒、调节内分泌、调气血、舒筋活络、卵巢保养、延缓更年期女性。1、培元固本,活血化瘀,温经止痛,有效缓解并消除女性经期的腹痛,腰骶酸痛,手脚冰冷等症状2、激活人体抗病基因,平衡机体功能,增强免疫力,改善微循环,月经不调,慢性盆腔炎,辅助治疗宫寒等症。3、调整人体内分泌系统,增强新陈代谢,缓解经期女性紧张,烦躁,精神抑郁症状,保持健康的精神状况,温暖子宫,保护卵巢。 产妇,流产妇女

1、本暖宫贴具有培元固本，暖宫护阴，调和气血，祛风散寒之作用，通过对气海穴的温热熨灸，并通过自身产生的红外线进行理疗，通经络，正血脉，恢复人体神经的正常机能，维持身体各个系统正常的血液循环，激发机体发挥自身修复功能，增强免疫力，平衡激素分泌，“月子病”使用很合适。2、对子宫进行有效的红外温热理疗，可激活子宫的活动机能，促进血管，子宫收缩，加快子宫内组织的修复生长，加快产后恶露的排出，防治产后腹痛，同时抵御各种细菌对子宫的侵害，使女人顺利度过生育（流产）之后的危害阶段。3、红外温热理疗的显著特征，可加速血液循环及身体微循环系统的新陈代谢，穴位熨灸可消耗多余热量，促进腹部脂肪分解，控制产后肥胖症，并消除妊娠纹，阻止女性面部黄褐斑的形成。

使用方法及用量1、沿真空包装袋打开，取出贴片，揭下衬纸，贴于正对“气海穴”（脐下3寸）的内裤外侧（避免温度过高烫伤皮肤，请贴于内裤外侧即可）；

2、一贴暖宫贴可用一天，每次效果维持16小时；

3、痛经及少女初潮者连续使用3-4个疗程，每次在月经来之前4天开始使用；

4、改善或消除妊娠纹和黄褐斑需要30-40天；5、调节内分泌，日常卵巢保养需15-30天；

6、各种产后疼痛及后遗症需20-30天；7、恢复形体需20-30天；

8、预防妇科疾病，延缓更年期需30-60天；

9、暖宫贴每天使用一次或隔间1至2天使用一次，日常保健每星期1-2次即可。

使用注意事项：只外敷用，勿口服，请存放于干爽及小孩拿不到的地方。不要经常直接贴于皮肤上，如皮肤有烫伤或过敏请停止使用。

规格：每片约13cm*10cm 6贴/盒