

# 艾灸装置|随身灸|艾灸装置厂家|督灸|明火艾灸|艾柱

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 艾灸装置 随身灸 艾灸装置厂家 督灸 明火艾灸 艾柱    |
| 公司名称 | 江西晋瑞医疗器械有限公司                  |
| 价格   | 120.00/盒                      |
| 规格参数 | 品牌:晋瑞医疗<br>型号:JR-ZZE<br>产地:江西 |
| 公司地址 | 江西省吉安市青原区河东经济开发区电子工业城1号标准厂房   |
| 联系电话 | 0796-8126677 13766227441      |

## 产品详情

### 艾灸装置 JR-ZZE型督灸

【产品名称】艾灸装置

【型号】艾灸装置JR-ZZE（督灸）

【规格】灸筒规格：JR-ZZE(督灸) 65X40mm,(灸柱) 30X15mm

【产品组成】主要由灸盖、定位针、灸柱、医用胶布、灸筒组成。

【配置清单】盒内配有灸筒（3个）、灸柱（9柱）医用胶布（9片）、镊子（1个）、使用说明书（1份）。

【作用和原理】艾灸装置是以经络学说为原理，采用中药配方，通过温热和药理作用，激发经络之气，调整脏腑功能，起到调节机体阴阳平衡，防止疾病的作用。

在使用艾灸装置进行灸疗时，药物燃烧产生的热量，刺激相关穴位，使局部皮肤机理开放，药物成分渗透达相应穴位内，起到温经通络、祛风散寒、活血化瘀、消肿止痛、改善周围组织血液循环等作用。

【适用范围】本品适用于身体穴位的灸疗（包括温灸、雷火灸、隔物灸），保健。

【操作说明】使用时将艾灸装置用医用胶布粘贴在欲灸的位置上，然后拨开灸筒盖，安装好灸芯，点燃灸后扣合在灸筒上，左右旋转筒身，通过调节进气孔大小，使灸的温度适中，（一般温度为42度）。升降灸筒盖也可调节灸温度，以皮肤感到明显的灼热感为度。

每个灸芯可施灸30分钟左右，待皮肤热感消失，灸筒壁凉，灸芯中灸柱燃烧完毕。拔开灸筒盖，取下灸芯，将灸芯按压熄火或放入盛水容器中，以确保灰烬完全熄灭。

如果续灸，在灸筒盖中重新安装新的灸芯，重复上述操作。施灸结束后，请将灸内的艾灰倒入盛水容器中，以确保无火后再行处理。请勿将灸芯直接扔进垃圾桶内，以免发生火灾。

一个灸筒可重复使用3次。