## 艾灸装置|随身灸|艾灸装置厂家|督灸|明火艾灸|艾柱

产品名称	艾灸装置 随身灸 艾灸装置厂家 督灸 明火艾灸  艾柱
公司名称	江西晋瑞医疗器械有限公司
价格	120.00/盒
规格参数	品牌:晋瑞医疗 型号:JR-ZZE 产地:江西
公司地址	江西省吉安市青原区河东经济开发区电子工业城 1号标准厂房
联系电话	0796-8126677 13766227441

## 产品详情

艾灸装置 JR-ZZE型督灸

【产品名称】艾灸装置

【型 号】艾灸装置JR-ZZE(督灸)

【规 格】灸筒规格: JR-ZZE(督灸) 65X40mm,(灸柱) 30X15mm

【产品组成】主要由灸盖、定位针、灸柱、医用胶布、灸筒组成。

【配置清单】盒内配有灸筒(3个)、灸柱(9柱)医用胶布(9片)、镊子(1个)、使用说明书(1份) 、

【作用和原理】艾灸装置是以经络学说为原理,采用中药配方,通过温热和药理作用,激发经络之气, 调整脏腑功能,起到调节机体阴阳平衡,防止疾病的作用。

在使用艾灸装置进行灸疗时,药物燃烧产生的热量,刺激相关穴位,使局部皮肤机理开放,药物成分渗达相应穴位内,起到温经通络、祛风散寒、活血化瘀、消肿止痛、改善周围组织血液循环等作用。

【适用范围】本品适用于身体穴位的灸疗(包括温灸、雷火灸、隔物灸),保健。

【操作说明】使用时将艾灸装置用医用胶布粘贴在欲灸的位置上,然后拔开灸筒盖,安装好灸芯,点燃灸后扣合在灸筒上,左右旋转筒身,通过调节进气孔大小,使灸的温度适中,(一般温度为42度)。升降灸筒盖也可调节灸温度,以皮肤感到明显的灼热感为度。

每个灸芯可施灸30分钟左右,待皮肤热感消失,灸筒壁凉,灸芯中灸柱燃烧完毕。拔开灸筒盖,取下灸芯,将灸芯按压熄火或放入盛水容器中,以确保灰烬完全熄灭。

如果续灸,在灸筒盖中重新安装新的灸芯,重复上述操作。施灸结束后,请将灸内的艾灰倒入盛水容器中,以确保无火后再行处理。请勿将灸芯直接扔进垃圾桶内,以免发生火灾。

一个灸筒可重复使用3次。