

儿科引进电脑中频药物导入治疗仪

产品名称	儿科引进电脑中频药物导入治疗仪
公司名称	河南迈通实业有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:迈通 型号:DJ-A6型 产地:河南郑州
公司地址	河南自贸试验区郑州片区(郑东)地润路18号C座10层1007号
联系电话	15238665023 15638585785

产品详情

儿科引进电脑中频药物导入治疗仪

本仪器（两路输出）结合现代计算机技术设置了多种治疗方式：

- 1.中频方式：利用低频调制的中频电流，具有降低人体阻抗且无电解作用，引起肌肉的强烈收缩，镇痛，消炎，去除水肿，改善血液、淋巴循环，锻炼骨骼肌，兴奋平滑肌，调整植物神经，软化瘢痕和松解粘连等功效。
- 2.导入方式：利用药物离子导入方式导入的药物只有发挥药理作用的那一部分离子，而不是混合剂，可以避免皮下或皮内注射等方法带入人体内的杂质引起的副作用，如胃肠刺激症状、注射后吸收不良等；可以将药物离子直接导入病灶区；在导入过程中，直流电流和药物离子作用于内、外感受器，通过反射途径而产生局部和全身的治疗作用。
- 3.“同步”治疗方式：对于一些患有类风湿、双膝关节骨质增生等病症的患者，他们的双膝都需要治疗，这时可以用同步治疗方式使用仪器的A、B两路同时对双膝做整体治疗，如果只是用单路的仪器同时治疗或分别治疗，效果显然不如同步治疗。
- 4.双处方、双输出治疗方式：人是一个整体，某一处疾病都会相应的有一个反射区，这一现象中医经络学早以详细阐明，例如：腰病会放射到腿；颈椎病会影响到手、臂等部位，所以有的病症需可以使用该方式在反射区和病因区同时施治。

本仪器综合上述各种功能之大成集中作用于病灶，其功效是引起机体所需的回答性反应，消除病因及病理过程，恢复被破坏了的生理平衡，唤起与增强机体防御系统，并创造良好的授药环境，从而借助药物药理功能达到治病和防病的目的。

适应症

小儿肺炎：

选穴：

1.天突—位于颈部前正中线上，两锁骨中间，胸骨上窝中央

2.定喘—第七颈椎棘突下，背中线旁开一指处

3.陶道—背正中线上，胸椎棘突下

4.肺俞—第三胸椎棘突下，背正中线上旁开二指处

咳嗽、气短可选天突+定喘（或陶道）；咳嗽痰多，听诊双下肺湿啰音可选肺俞+左右肩胛下区（双侧肩胛骨下方）

疗程5-7天

小儿腹泻：

选穴：

1.关元—前正中线上脐下3寸处

2.大肠俞—第四腰椎棘突下，背中线旁开二指处

3.命门—背正中线上，第二腰椎棘突下

说明：可选神阙（关元）+大肠俞；神阙（关元）+命门

疗程3-5天

小儿厌食：

1.神阙—位于肚脐中央

2.中腕—胸骨下端和肚脐

3.脾俞—第十一胸棘突下，背中线旁开二指处

4.胃俞—第十二胸椎棘突下，背中线旁开二指处

说明：可选择神阙+脾俞（胃俞）；中腕+脾俞

疗程7-15天